

Brugermanual

RX901B





Indholdsfortegnelse

Advarsel og sikkerhedsforskrifter	3
Produktbeskrivelse.....	5
Ibrugtagning.....	6
Startskærm	7
Modtagelse af alarm	8
Nødkald	9
Klienter og sendere.....	10
Batterialarm	11
Hovedmenu	12
Vedligehold	23
Rengøring	23
Reservedele og tilbehør	23
Kontrol af dækningsområde	24
Tekniske data	25
Symbolforklaring og godkendelser	26

Advarsel og sikkerhedsforskrifter



- Batteriet i dette produkt overholder de relevante IEC-sikkerhedsstandarder for batterier.
- Læs sikkerhedsforskrifterne på strømforsyningsenheden inden brug.
- Strømforsyningsenheden skal overholde de relevante IEC-sikkerhedsstandarder.
- Ved udskiftning af strømforsyningsenheden eller lade-pladen skal anvendes originale eller/og godkendte enheder.
- Batteriet må ikke udskiftes, produktet skal sendes til reparation.
- Læs tilsigtet anvendelse inden ibrugtagning.
- Produktet er ikke vandafvisende, medmindre det er angivet i produktspecifikationen.

Kontraindikationer

Generelt kan produktet ikke bruges, hvis:

- Den handicappede klient/patient er psykisk syg.
- Den handicappede klient/patient er kritisk syg.
- Klienten/patienten er ikke i stand til at bruge senderen.

Levetid efter montering af enheden

Batteriet skal i givet fald udskiftes, når informationen om udskiftning af batteri vises på produktet og i henhold til brugermanualen.

Levetiden vurderes i forhold til trykknappen. Denne er lavet i henhold til leverandørens specifikation.

Levetid for batteri (gældende for produkter med batteri)

KNOP beregner batteriernes levetid. Se specifikation i brugermanualen.

Tilsigtet brug

Generelt er de forskellige varianter af det medicinske udstyr (transmittere/modtagersystem fra KNOP Elektronik) lavet som et hjælpemiddel til handicappede/patienter, så de kan tilkalde hjælp.

De forskellige varianter af det medicinske udstyr består af en kombination af produkter (transmitter og modtager), der er designet til at tilkalde hjælp til svækkede/handicappede patienter; sender-modtagersystemet kan aktiveres på forskellige måder:



- F.eks. patienter, der aktivt gør det og er klar over, at de tilkalder hjælp, som f.eks. gangbesværede, der har brug for hjælp til at gå på toilettet.
- Eller handicappede patienter, som ikke er klar over, at de uforvarende lægger pres på transmitteren, f.eks. under en krampe.
- Eller patienter med intellektuelle og kognitive mangler, som ikke er klar over, at en modtager, modtager et signal fra deres sender, når de forlader et hus eller et rum.

Systemet er ikke designet til kritisk eller psykisk syge personer.

Generel produktbeskrivelse

Produkterne fra KNOP Elektronik består af flere varianter af sendere og modtagere, som kan kombineres med hinanden. Derudover bruges disse produkter i kombination med positionerings- og repeatersystemer.

Disse produkter er medicinsk udstyr, der er beregnet til at tilkalde hjælp og bruges til handicappede/mobile personer, f.eks. gangbesværede, der har brug for hjælp til at gå på toilettet. Senderne aktiveres f.eks. af en lyd eller et tryk (f.eks. et tryk med en finger eller et pust fra munden). Modtageren overvåges af sundhedspersonale eller lægfolk i private hjem.

Systemet er ikke designet til kritisk eller psykisk syge mennesker.

En del af produktet	Funktion i produktsystemet
Sender	Senderen kan sende signalet fra patienten til modtageren, der overvåges af sundhedspersonalet eller en lægmand. Senderprodukterne kan aktiveres med knap, lyd, pust eller bevægelser.
Modtager	Senderne kan kodes til alle modtagere og til flere modtagere på samme tid. Nogle modtagere har også en tilkaldeknap, så de kan tilkalde hjælp fra deres kollegaer.
Repeatersystem	Hvis der er behov for at dække et mere omfattende og større område, bruges et repeatersystem. Repeatersystemet giver også en øget funktionalitet, som f.eks. at en alarm automatisk modtages først af den sundhedsperson, der er tættest på klienten.
Positionssystem	Hvis en sender er udstyret med en positionsmodtager, kan den bruges i forbindelse med et positionssystem. Ikke alle produktvarianter inkluderer positionsmodtagere. Det ses typisk i forbindelse med plejehjem og sikkerhed for demente. Modtagerne kan være bærbare eller stationære.



Produktbeskrivelse

RX901B er en modtager designet til at modtage koder fra KNOPs trådløse sendere.

Enheden kan bæres i lommen eller i en snor om halsen.

Der kan indkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn efter eget valg.

De sidste 50 kald gemmes på en liste, hvor man kan se tidspunktet for kaldet samt, hvor kaldet kommer fra, og om det er kvitteret.

Med en RX901B er det f.eks. muligt at opdele klienter (beboerne) på et plejecenter i grupper, f.eks. i forbindelse med vagtplaner, hvor en nattevagt skal servicere flere klienter end dagvagten. RX901B er med positionslæser, så de kan anvendes i KNOPs positioneringssystem.

Det er med RX901B muligt at foretage et nødkald til en anden kollega med et enkelt tryk.

Betjeningen er menuopbygget i en grafisk skærm og betjenes på tastaturet.

RX901B er med opladeligt batteri og trådløs opladning.

Ibrugtagning

Det anbefales, at RX901B oplades til 100%, før det tages i brug.
Den medfølgende trådløse oplader tilsluttes adapteren via USB kablet.

RX901B lægges ovenpå opladepladen, hvorefter displayet tændes, og viser batteriets opladetilstand i procent.

Hvis enheden er helt afladet, kan der gå op til 5 minutter, før displayet tænder.

Pakkens indhold:



RX901B på opladeren:



Første gang produktet tændes, skal det ønskede sprog vælges.



Tryk   for at flytte den grønne pil til det ønskede sprog.

Tryk  for at vælge sproget.

Startskærm

Første gang enheden skal tændes, skal den lægges på opladeren.

Når RX901B ikke ligger på opladeren, slukker skærmen ca. 10 sekunder efter sidste betjening.

Ved tryk på en af tasterne tænder displayet, hvorefter ur og dato vises. Øverst vises navnet på brugeren, hvis denne er indkodet ellers "RX901B".



Betydning af symbolerne i statuslinjen:

Batteritilstand:



Batteri ok.



Opladning tilrådes.



Batteriet er næsten brugt, og skal oplades snarest.

Alarmlyd:



Alarmlyd er slået til.



Alarmlyd er slået fra.

Vibrator:



Vibrator er slået til.



Vibrator er slået fra.

System – vises kun, hvis systemet er tilkoblet:



Systemet er forbundet.



Forbinder til systemet.



Systemsignal udfald.



Systemsignal mistet.

Tryk  for se opkaldslisten.

Modtagelse af alarm

Når modtageren modtager en alarm fra en indkodet sender, vises navn, type samt tidspunkt for modtagelse samt eventuel position.



Andersen

Navnet på klienten.

Stue 10

Valgfri på klienten.

TX901

Produktet eller en indkodet tekst der har afsendt alarmer.

Hoveddør

Positionen på afsenderproduktet .

1. Grøn knap

Alarmopkaldstype.

De enkelte tekster vises kun, hvis de er indkodet eller kendt.

Tryk  for at bekræfte alarmer.

Tryk  for at afvise.

Bemærk: I simple systemer håndteres alarmkaldet ens, uanset om kaldet accepteres eller afvises fremfor som i KNOPs repeatersystem (MR90X/RP90X), hvor alarmer viderestilles automatisk til andre modtagere.

Hvis alarmer er ubesvaret, vil der komme korte lyde ca. hver 5. minut.

Når der modtages en besked fra en sender, der f.eks. har dårligt batteri fremkommer nedenstående besked:



Tryk  for at bekræfte alarmer.

Note: Ved "Seneste kald" vil man kunne se beskeden "Lavt batteri" for senderen, hvor der skal udskiftes batteri.



Nødkald

Det er muligt at sende et nødkald (eller alarm) fra modtageren til f.eks. andre brugere til at indikere "jeg har brug for hjælp" hos en klient eller som overfaldsalarm.

Nødkaldet aktiveres ved at trykke på KNOP-logoet.

Når nødkaldet sendes, vibrerer modtageren en gang, og når nødkaldet er modtaget hos en anden bruger, vibrerer den 3 gange.

Nødkald	Nødkald	Nødkald
Sender nødkald!	Sender nødkald!	Sender nødkald!
	Fejl!	OK



Klienter og sendere

Før man kan indkode en sender i modtageren, er det nødvendigt at oprette en klient, hvor senderen skal tilhøre.

En klient kan være en person, et rum eller andet. F.eks. kunne klienten være "Sven" (bliver brugt som eksempel).

Vores klient "Sven" kunne have en eller flere sendere tilknyttet.

"Sven" har f.eks. en armbåndssender, en sengealarm, en bevægelsessensor og andre produkter.

Når "Sven" aktiverer en alarm fra hans/hendes produkter vil det fremgå på displayet at alarmen er fra "Sven" samt hvilket produkt der er afsender, således man allerede fra starten har en årsag til alarmen.

Det kræver naturligvis at navne m.v. er indkodet som ønsket.

Klienter oprettet under Indstilling/Klienter/Tilføj klient:

Indstillinger	Hovedmenu	Klienter
Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ændre gruppe Indstil ur	↑ Sluk (dvale) Gruppevalg Vibrator: Fra Lyd: Fra → Indstillinger	→ Tilføj klient Sven Arne Alle sendere

Tilføj under Indstilling/Klienter/Klient/Tilføj Sender:

Hovedmenu	Klienter	Indstillinger	Sven
↑ Sluk (dvale) Gruppevalg Vibrator: Fra Lyd: Fra → Indstillinger	Tilføj klient → Sven Arne Alle sendere	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Ændre gruppe Indstil ur	Room 10 TX901 → Tilføj sender Vælg gruppe Klientnavn



Batterialarm

Modtageren indikerer batteri status på skærmen samt ved afladet batteri med lyd indikereringer.

Batteritilstand:



Batteriet er OK.



Uskiftning af batteriet tilrådes.



Batteriet er opbrugt, og skal udskiftes.

Skifter symbolet til rødt, bør man straks lægge enheden på opladeren.

Samtidig kommer der et par korte bep lyde ca. hver 5. minut, som indikerer lavt batteri, samtidig med, at nedenstående skærm vises:





Hovedmenu

Ved at trykke på  og  samtidigt, enten ved slukket skærm eller i startskærmen, fremkommer hovedmenuen. Den grønne pil i venstre side viser, hvilken linje i menuen, der kan vælges.

Hovedmenu	Hovedmenu
→ Seneste kald	↑ Sluk (dvale)
Sluk (dvale)	Gruppevalg
Gruppevalg	Vibrator: Til
Vibrator: Til	Lyd: Høj
Lyd: Høj	→ Indstillinger

Betjening

Tryk  for at flytte den grønne pil enten op eller til højre i menuen.

Tryk  for at flytte den grønne pil enten ned eller til venstre i menuen.

Tryk  for at forlade menuen.

Tryk  for at vælge menupunktet, hvor den grønne pil står ud for.

Bemærk: Efter ca. 60 sekunders inaktivitet forlades menuen automatisk.

Se seneste opkald:

Hovedmenu	Seneste kald
→ Seneste kald	→ Andersen
Sluk (dvale)	Andersen
Gruppevalg	Andersen
Vibrator: Fra	Slet alle
Lyd: Lav	

Andersen	Kaldet blev accepteret.
→ Andersen	Kaldet blev afvist.
Andersen	Kaldet blev ikke besvaret.

  Bladre imellem andre alarmopkald.

Se yderligere informationer om opkaldet:

Seneste kald	Seneste kald
Andersen	Andersen
Stue 10	TX901
15:39:56	Hoveddør
Accepteret	1. Grøn knap

 Se detaljer.

  Blader imellem andre alarmopkald.

Slet opkaldslisten:

Seneste kald	Seneste kald
Andersen	Slet alle
Andersen	Bekræft?
Andersen	
→ Slet alle	 

 Bekræfte for at slettet.



Sæt modtageren i dvale:



Ent Bekræfte eller **Esc** afvise.

RX901C modtageren tændes igen ved at trykke på en knap.

Gruppevalg:



Ent Tilvælge eller fravælge gruppe.

Esc Forlad menu.

↓ **↑** Flyt pilen til gruppen, der ønskes ændret.

1 Gruppen er tilvalgt.

1 Gruppen er fravalgt.

Vibrator funktion:



Esc Tilvælge eller fravælge vibratorfunktion.

Esc Forlad menu.

Lydindstilling:



Ent Vælg imellem høj, lav eller slukket lyd, når der modtages et alarmopkald.

Indstillinger og indkodning:



Ver: 3.3.14
ID: 58651

Softwareversion.
Serienummer.



Opret og ændre klient:

Indstillinger
Ver: 3.8.1
ID: 123456
→ Klienter
Ændre gruppe
Indstil ur

Tilføj ny klient:

Indstillinger	Klienter
Ver: 3.8.1	→ Tilføj klient
ID: 123456	Petersen
→ Klienter	Jensen
Ændre gruppe	Andersen
Indstil ur	Alle sendere

Vælg Tilføj klient og tryk **Ent**.

Ændre af klientens indstillinger:

Klienter	Andersen
Tilføj klient	Stue 10
Petersen	→ TX901
Jensen	Tilføj Sender
→ Andersen	Grupper
Alle sendere	Navn

Andersen
Stue 10
→ TX901

Klienten.
Klienten valgfri tekst.
Et allerede indkodet produkt.



Tilføj sender:

Andersen Stue 10 → Tilføj Sender Grupper Navn ↓ Tekst	Tilføj sender Aktivere ny sender... 
---	--

Aktiver nu den ønskede sender.

Tilføj sender ID: 60372 TX901 Tilføj?  
--

Accepter tilføjelse.

Tilføj sender Overfør fra: Petersen Bekræft?  

Hvis senderen allerede er indkodet, fremkommer nedstående menu, som gør det muligt at flytte en sender imellem klienter.

Klientens gruppevalg:

Sven Rum 10 TX901 Tilføj sender → Vælg gruppe ↓ Klientnavn	Sven Vælg gruppe Gruppe: 1 ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8
---	--

-  Tilvælge eller fravælge gruppe.
-  Forlad menu.
-  Flyt pilen til gruppen, der ønskes.

-  Gruppen er tilvalgt.
-  Gruppen er fravalgt.

Navngiv ny klient:

Sven ↑ TX901 Tilføj sender Vælg gruppe → Klientnavn ↓ Klienttekst	Klientnavn Gem? ♦ 4 5 6 7 8 9 a b c d Sven Indtast navn på klient
--	---

-  Bogstavet til venstre.
-  Bogstavet til højre.
-  Vælg bogstavet.
-  Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ♦ og tryk .



Tilføj valgfri tekst:

Sven	Sven
↑ Tilføj sender	Gem?
Vælg gruppe	◆ 456789 a b c d
Klientnavn	Rum 10
→ Klienttekst	Indtast tekst
Slet	for klient

 Bogstavet til venstre.

 Bogstavet til højre.

 Vælg bogstavet.

 Slet det sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk  .



Tilføj/ændre/information sender:

Tilføj sender	Sven	Sven
TX901	↑ Sender tekst	↑ Alarm signal
ID: 60372	Alarm signal	Kaldstekster
Ver.: 1.0	Kaldstekster	Kald: Alle
Signal tone 1	→ Kald: Alle	Tidsstyret
↓ Tekst	↓ Tidsstyret	→ Slet

TX901	Produktnavn.
ID: 60372	ID
Ver.: 1.0	Softwareversion.
Signal tone 1	Den valgte signal tone.

Ændre senderens tekst:

Andersen	Sender tekst
↑ Signal tone 1	Gem?
→ Sender tekst	d ♦ e f g h i j k l m n
Alarm signal	Armbånd
Kaldstekster	Indtast tekst
↓ Ud g a n g e	for sender

- Bogstavet til venstre.
- Bogstavet til højre.
- Vælg bogstavet.
- Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ♦ og tryk .

Ændring af signaltonen ved alarmopkald:

Andersen	Andersen
↑ Signal tone 1	TX901
→ Sender tekst	Signal tone 1
Alarm signal	↓
Kaldstekster	1 2 3 4 5
↓ Ud g a n g e	

- Vælg signal tone.
- Gem og acceptere.

Kaldstekster:

Andersen	Ændre tekst	2. Rød knap
↑ Signal tone 1	1. Grøn knap	↑ Møde slut
→ Sender tekst	→ 2. Rød knap	Utilpashed
Alarm signal	3. Gul knap	Observer
→ Kaldstekster	4. Blå knap	Interager
↓ Ud g a n g e	↓ KNOP knap	→ Alarmer

Vælg knappen hvor teksten ønskes ændret og tryk .

Vælg nye tekst og tryk .

Brugerdefinerede tekster kan laves i KNOPtool.

Opkald type:

Andersen	Andersen
↑ Alarm signal	↑ Alarm signal
Kaldstekster	Kaldstekster
Ud g a n g e	Ud g a n g e
→ Kald: Normal	→ Kald: Alle
↓ Tidsstyret	↓ Tidsstyret

- Vælg imellem **Normal** og **Nød!**



Tidsstyring af senderen:

Andersen	Andersen
↑ Kaldstekster	→ Tidsstyret:Til
Udgange	Start 1 08:00
Kald: Normal	Stop 1 16:00
→ Tidsstyret	Start 2 00:00
Slet	Stop 2 00:00

- Ent Skifte imellem "Fra" og "Til".
- ↓ ↑ Ændre menupunkt eller timer/minutter.
- Ent Skift imellem menuerne.

Slet sender hos klienten:

Andersen	Ændre tekst
↑ Kaldstekster	Slet:
Udgange	TX901
Kald: Normal	Bekræft?
Tidsstyret	 
→ Slet	

- Ent Bekræfte sletning.



Indstil og navngiv grupper:

Indstillinger	Grupper
Ver: 3.8.1	Dagvagt
ID: 123456	
Klienter	↓
→ Ændre gruppe	1 2 3 4 5 6 7 8
↓ Indstil ur	

Ent Vælg den ønskede gruppe.

Til- og frakobl tidsstyring:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
→ Tidsstyret:Til	→ Tidsstyret:Fra
Gruppenavn	Gruppenavn
Tidsstyret	Tidsstyret

Ent Skift imellem "Fra" og "Til".

Esc Forlad menu.

Tip: Husk at indstille tidspunkt i menupunkt "Tid".

Ændre gruppenavn:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
Tidsstyret:Til	Gem?
→ Gruppenavn	◆ 4 5 6 7 8 9 a b c d
Tidsstyret	Dagvagt
	Indtast
	gruppenavn

↑ Bogstavet til venstre.

↓ Bogstavet til højre.

Ent Vælg bogstavet.

Esc Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk **Ent**.

Ændring af aktiveringstidspunktet:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
Tidsstyret:Til	Start 07:00
Gruppenavn	Stop 15:00
→ Tidsstyret	

↓ **↑** Ændre timer/minutter.

Ent Skift imellem timer og minutter.

Esc Forlad menu.

Indstil ur:

Indstillinger	Indstil ur
↑ ID: 123456	2020-09-01
Klienter	13:27
Ændre gruppe	
→ Indstil ur	År: 2020
↓ Tastelyd: Lav	

↓ **↑** Ændre oplysningen.

Ent Acceptere og gå til næste punkt.

Bemærk: Såfremt modtageren får en ur opdatering fra et andet produkt eller USB901, bliver uret indstillet i henhold hertil.



Tastelyd ved tryk på knap:

Indstillinger	Indstillinger
↑ Klienter	↑ Klienter
Ændre gruppe	Ændre gruppe
Indstil ur	Indstil ur
→ Tastelyd: Lav	→ Tastelyd: Høj
↓ Produktnavn	↓ Produktnavn

- Ent** Skift imellem **Lav**, **Høj** og **Fra**.
Esc for at forlade menuen.

Ændre modtagerens navn:

Indstillinger	Navn
↑ Ændre gruppe	Gem?
Indstil ur	◆ 456789 a b c d
Tastelyd: Lav	RX901
→ Produktnavn	Indtast
↓ Adgangskode	produktnavn

- ↑** Bogstavet til venstre.
↓ Bogstavet til højre.
Ent Vælg bogstavet.
Esc Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk **Ent**.

Oprettelse af adgangskode:

Indstillinger	Adgangskode
↑ Indstil ur	Ny kode
Tastelyd: Lav	
Produktnavn	
→ Adgangskode	Kode: 1234
↓ Udgående	

- ↑** **↓** Ændre værdien (0 til 9).
Ent Vælg tallet.
Esc Slet sidste ciffer.

Koden skal altid være på 4 ciffer.
 Kode "0000" er ingen kode.

Ændring af KNOP-logo funktion:

Indstillinger	Udgående
↑ Tastelyd: Lav	→ Kald: Alle
Produktnavn	
Adgangskode	
→ Udgående	
↓ Positioner	

- Ent** Vælg imellem **Frakoblet**, **Nød** eller **Normal**.

KNOP knappens sender funktion.


Tilslutning og ændring af systemkode:

Indstillinger	System menu
↑ Produktnavn	→ System: Til
Adgangskode	ID: 0
Udgående	
→ System menu	
↓ Positioner	

- Ent** Skift imellem system **Fra** eller **Til**.



Indstil system-ID:

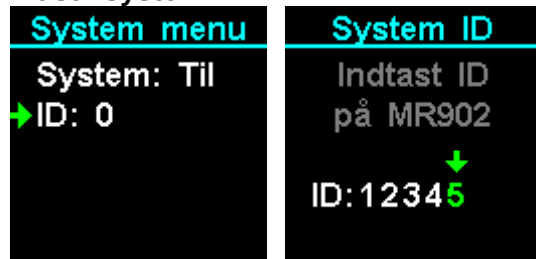


- Ændre værdien (0 til 9).
- Vælg tallet.
- Slette det sidste ciffer.

Positioner:



Vis position:

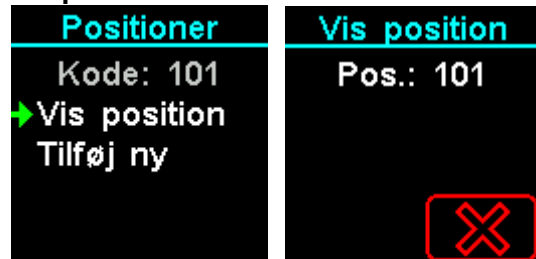

Viser aktuelle position, såfremt man står i en position.



Nuværende position.
Allerede indkodet position.


Tilføj position:



Gem positionen.

Bemærk, modtageren skal være indenfor rækkevidde af en positionsstav.

Ændre positionsnavn:

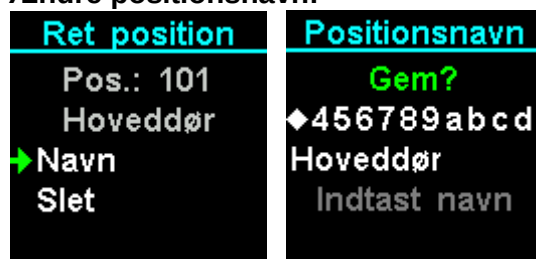

- Bogstavet til venstre.
- Bogstavet til højre.
- Vælg bogstavet.
- Slet sidste bogstav.

For at gemme navnet vælges symbolet ◆ og tryk .



Slet position:



Ent Accepter og slet positionen.


Indstil sprog:



Vælg ønskede sprog.

Ent Accepter og gem.

Sluk modtager:

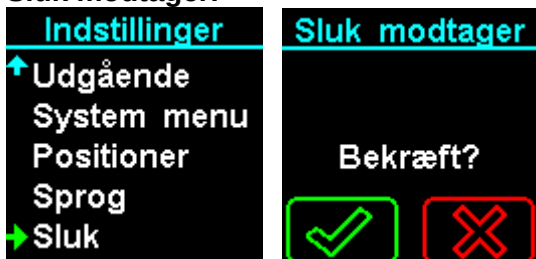

Ent Accepter og sluk.

For at tænde modtageren, læg modtageren på opladeren.



Vedligehold

Softwareopdatering af RX901B:

Det er muligt at opdatere softwaren i RX901B samt downloade og uploade opsætning med KNOptool. For nærmere beskrivelse henvises til vejledningen for KNOptool.

Rengøring

Produktet kan rengøres med frugtig klud eller spritserviet.

Reservedele og tilbehør

Reservedele og tilbehør kan bestilles på vores hjemmeside www.knop.dk



Kontrol af dækningsområde

En person aktiverer en sender (f.eks. TX901) med korte mellemrum, mens en anden går systematisk rundt i området og på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning afmærker. Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer.

Dækningsområdet kan øges ved brug af KNOP's repeatersystem.

Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.



Tekniske data

Batteri:	Litium batteri, LP853048 3,7V 1200mA
Driftstid på batteri:	Ca. 3 døgn med 50 alarmopkald pr. døgn.
Opladning:	Trådløst, ca. 4 timer
Strømforsyningsenhed:	230VAC adapter USB 5VDC/1,0A
Frekvens HF:	869,2125 MHz ⁽¹⁾
Rækkevidde:	Optil 1500 m mellem TX901 og RX901B ⁽²⁾
Display:	Grafisk LCD
Menutekster:	Dansk, Norsk, Svensk, Finsk, Engelsk og Tysk.
Logfunktion:	Gemmer de sidste 50 alarmopkald.
Hukommelse:	250 sender 150 positionsstav POS901
Omgivelsesmiljø:	Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke kondenserende.
Omgivelsestemperatur:	0°C til 40°C
Kabinetype:	Farve RAL9003 ABS
Kabinetdimensioner:	45 x 90 x 16 mm. Inkl. halssnor med sikkerhedslås, der bryder ved træk.
Tæthed:	IP65
Vægt inkl. batterier:	56g

Ret til ændringer forbeholdes

All rights reserved.

© **KNOP** Elektronik A/S

⁽¹⁾ Ved tilkobling på KNOPs repeatersystem anvendes også 868,049/100/150 MHz.

⁽²⁾ Målt udendørs med fri sigt mellem sender og modtager. I bygninger, er rækkevidden reduceret.

Symbolforklaring og godkendelser

	Dette produkt overholder disse standarder og direktiver: Directive 2017/745/EU MDR Directive 1907/2006/EU REACH Directive 2011/65/EU RoHS Directive 2012/19/EU WEEE ISO 14971:2019 Risk Management for Medical devices EN 301 498-1 V2.2.3 Electro Magnetic Compatibility EN 301 489-3 V3.1.1 Electro Magnetic Compatibility EN 50130-4:2011 + 2014 Immunity alarm systems EN 300 220-1 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-2 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-3 V2.1.1 Short Range Devices EN 60601-1-2:2014 + 2015 Electromagnetic compatibility (Medical) EN 62368-1:2020 Electrical safety EN 50581:2012 Hazardous substances
	Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.
	Medical Device Klasse 1, regel 1
	Manufacturer KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer
	Læs manual(er) før installation og ibrugtagning. Find manual her: https://www.knop.dk
	Der kan ske interferens i omgivelserne af udstyr mærket med dette symbol.
	Skal beskyttes imod væske.
	0°C to +40°C, temperatur grænse for transport/opbevaring og anvendelse.
	Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
	Single Registration Number DK-MF-000025631
	Unique Device Identifier 05744002850298
	Product reference RX901B Receiver
	Serial Number Serienummeret er placeret på produktet
	Ingress Protection kode IP65