

Bruksanvisning

RX901B





Innholdsfortegnelse

Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner	3
Produktbeskrivelse	5
Igangkjøring	6
Startskjermen	7
Nødanrop	9
Hovedmeny	12
Innstillinger og koding:	14
Vedlikehold	23
Rengjøring	23
Resevedele & tilbehør	23
Sjekk dekningsområdet	24
Tekniske data	25
Symbolforklaring og godkjenninger	26

Advarsler og sikkerhetsinstruksjoner



- Batteriet i dette produktet oppfyller de relevante IEC-sikkerhetsstandardene for batterier.
- Les sikkerhetsinstruksjonene på strømforsyningen før du bruker den.
- Strømforsyningsenheten må oppfylle de relevante IEC-sikkerhetsstandardene.
- Ved utskifting av strømforsyningsenhet eller ladeplate må du bruke originale og/eller godkjente enheter.
- Batteriet må ikke skiftes, men produktet må sendes til reparasjon.
- Les tiltenkt bruk før du bruker den.
- Produktet er ikke vannavstøtende med mindre det er angitt i produktspesifikasjonen.

Kontraindikasjoner

Generelt kan produktet ikke brukes hvis:

- Den funksjonshemmede klienten/pasienten er psykisk syk.
- Den funksjonshemmede klienten/pasienten er alvorlig syk.
- Klienten/pasienten ikke er i stand til å bruke senderne.

Levetid etter montering av enheten

Batteriet må skiftes ut når informasjonen om batteribytte vises på produktet og i henhold til brukerhåndboken.

Levetiden vurderes i forhold til trykknappen. Dette gjøres i henhold til leverandørens spesifikasjon.

Batteriets levetid (produkter med batteri)

KNOP beregner levetiden til batteriene. Se spesifikasjon i brukerhåndboken.

Tiltenkt bruk

Generelt er de ulike variantene av det medisinske utstyret (sender/mottakersystem fra KNOP Elektronik) laget som et hjelpemiddel for funksjonshemmede/funksjonshemmede pasienter for å kunne tilkalle hjelp.

De ulike variantene av det medisinske utstyret består av en kombinasjon av produkter (sender og mottaker) som er utviklet for å tilkalle hjelp til pasienter med nedsatt funksjonsevne, og sender/mottakersystemet kan aktiveres på forskjellige måter:



- For eksempel pasienter som aktivt gjør dette og er klar over at de tilkaller hjelp, som f.eks. personer med gangvansker som trenger hjelp til å gå på toalettet.
- Eller funksjonshemmede pasienter som ikke er klar over at de utilsiktet legger press på avsenderen, f.eks. under en krampe.
- Eller pasienter med intellektuelle og kognitive mangler som ikke er klar over at en mottaker mottar et signal fra senderen deres når de forlater et hus eller et rom.

Systemet er ikke utviklet for kritisk eller psykisk syke personer.

Generell produktbeskrivelse

Produktene fra KNOP Elektronik består av flere varianter av sendere og mottakere som kan kombineres med hverandre. I tillegg brukes disse produktene i kombinasjon med posisjons- og repeatersystemer.

Disse produktene er medisinsk utstyr som er beregnet på å tilkalle hjelp og brukes av funksjonshemmede/mobile personer, for eksempel personer med gangproblemer som trenger hjelp til å gå på toalettet. Senderne aktiveres for eksempel med en lyd eller ved trykk (f.eks. ved å trykke med en finger eller puste gjennom munnen). Mottakeren overvåkes av helsepersonell eller lekfolk i private hjem.

Systemet er ikke utviklet for kritisk eller psykisk syke personer.

Del av produktet	Funksjon i produktsystemet
Sender	Senderen kan sende signalet fra pasienten til mottakeren som overvåkes av helsepersonell eller lekfolk. Senderproduktene kan aktiveres med knapp, lyd, slag eller bevegelse.
Mottaker	Senderne kan kodes til alle mottakerne og til flere mottakere samtidig. Noen mottakere har også en tilkallingsknapp for å tilkalle assistanse fra kollegaer.
Repeatersystem	Hvis det er behov for å dekke et mer omfattende og større område, brukes et repeatersystem. Repeatersystemet gir også økt funksjonalitet, f.eks. ved at en alarm automatisk mottas først hos det helsepersonellet som er nærmest klienten.
Posisjonssystem	Hvis en sender er utstyrt med en posisjonsmottaker, kan den brukes i forbindelse med et posisjonssystem. Ikke alle produktvarianter inkluderer posisjonsmottakere. Vanligvis ser man det i forbindelse med sykehjem og sikkerhet for demente pasienter. Mottakerne kan være bærbare eller stasjonære.



Produktbeskrivelse

RX901B er en mottaker designet for å fungere med trådløse KNOP-enheter.

Enheteren kan bæres i en lomme eller på et halskjede rundt halsen.

Opptil 250 sendere kan kodes og tildeles et navn etter eget valg.

De siste 50 samtalene lagres i en liste hvor du kan se tidspunktet for samtalen, hvor samtalen kom fra og om den ble bekreftet.

Med en RX901B er det for eksempel mulig å dele opp klienter ved en omsorgsinstitusjon i grupper, for eksempel i forbindelse med turnusplaner, hvor nattvakten skal betjene flere klienter enn dagvakten.

RX901B er utstyrt med en posisjonsleser, slik at den kan brukes i KNOP posisjoneringssystem.

Med RX901B er det mulig å foreta et nødansrop til en annen kollega med et enkelt trykk.

Bruken er menystrukturert i et grafisk display og styres ved hjelp av tastaturet.

RX901B er utstyrt med et oppladbart batteri og trådløs lading.

Produktet er vanntett (IP65).

Igangkjøring

Det anbefales å lade RX901B til 100 % før bruk.

Den medfølgende trådløse laderen kobles til adapteren via USB-kabelen.

RX901B er plassert på toppen av ladeplaten og RX901Bs display lyser og viser batteriladenivået i prosent.

Hvis enheten er helt utladet, kan det ta opptil 5 minutter før displayet lyser.

Pakkeinnhold:



RX901B i laderen:



Når produktet slås på for første gang, må ønsket språk velges.



Trykk   for å flytte den grønne pilen til ønsket språk.

Trykk  for å velge språk.

Startskjermen

Første gang enheten skal slås på etter utpakking, må den plasseres på laderen.
Når RX901B ikke er koblet til laderen, slår skjermen seg av ca. 10 sekunder etter siste handling.
Hvis du trykker på en tast, slås displayet på og viser klokkeslett og dato.
Brukerens navn vises øverst hvis kodet ellers er "RX901B".



Alternativer på startskjermen:



Navnet på f.eks. et produkt eller et sted kan endres til ønsket navn.

Gjeldende klokkeslett og dato vises i hvit tekst.



Klokken må stilles.

Batteristatus:



Batteri OK.



Lading anbefales.



Batteriet er nesten tomt og må lades.

Alarm lyd:



Alarmlyden er på.



Alarmlyden er slått av.

Vibrator:



Vibratoren er aktivert.



Vibratoren er slått av.

System - vises kun hvis systemet er tilkoblet:



Systemet er tilkoblet.



Kobles til systemet.



Avbrudd av systemets signal.



Systemsignalet har gått tapt.

Trykk  for å se anropslisten.



Motta alarmer

Når mottakeren mottar en alarm fra en kodet sender, vises navn, type og tidspunkt for mottak og eventuell posisjon.



Kundens navn
Navnet på det valgte stedet i huset.
Type sender.
Plassering for alarmen.
Nødknapp / funksjon.

De enkelte tekstene vises kun hvis de er kodet eller kjent.

Trykk  for å bekrefte alarmen.

Trykk  for å avvise.

Merk: I det enkle systemet håndteres alarmanropet på samme måte, uansett om det aksepteres eller avvises, i stedet for som i KNOPs repeatersystem (MR90X/RP90X) hvor alarmen automatisk videresendes til andre mottakere.

Hvis alarmen ikke besvares, høres korte lyder omtrent hvert femte minutt.

Når en melding mottas fra en avsender, f.eks. med lavt batterinivå, vises meldingen nedenfor.



Trykk  for å bekrefte alarmen.

Merk: "Nylig anrop" viser meldingen "lavt batteri" for senderen der batteriet må skiftes.



Nødanrop

Det er mulig å sende et nødanrop (eller alarm) fra mottaker til andre brukere, for eksempel for å indikere "jeg trenger hjelp" hos en klient eller som en overfallsalarm.

Nødanropet aktiveres ved å trykke på KNOP-logoen.

Når nødanropet sendes, vibrerer mottakeren én gang og når nødanropet mottas av en annen bruker, vibrerer mottakeren tre ganger.



Batterialarm


Mottakeren indikerer batteristatus på displayet og når batteriet er utladet med lydindikasjoner.

Batteristatus:

-  Batteri OK .
-  Lading anbefales.
-  Batteriet er nesten tomt og må lades.

Hvis symbolet endres til rødt, sett umiddelbart enheten inn i laderen.

Samtidig høres noen korte pip omtrent hvert femte minutt, noe som indikerer lavt batteri, mens skjermen nedenfor vises:

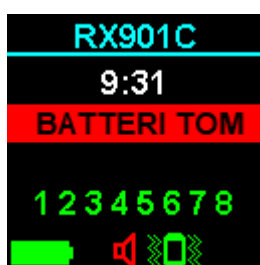



Kunder og avsendere

Før du kan kode en sender i mottakeren, må du opprette en klient som senderen tilhører.

En klient kan være en person, et rom eller noe annet. klienten kan for eksempel være "Sven Andersønn" (brukt som eksempel).

Vår klient "Sven" kan ha en eller flere sendere koblet til seg.

Sven (vår oppdragsgiver) har for eksempel en armbåndssender, en sengealarm, en bevegelsessensor og andre produkter.

Når "Sven" aktiverer alarm fra produktene sine, viser displayet at alarmen kommer fra "Sven" og hvilket produkt som er avsender, slik at årsaken til alarmen er kjent fra begynnelsen.

Dette forutsetter selvsagt at navn etc. er kodet på ønsket måte.

Klienter opprettet under Innstillinger / Klient / Ny klient:

Hovedmeny	Innstillinger	Klienter
↑ Slå av (sove) Gruppevalg Vibrasjon: På Lyd: Høy → Innstillinger	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Gruppeoppset ↓ Still klokke	→ Ny klient

Legg til under Innstillinger / Klient / Klient (Sven) / Ny avsender:

Hovedmeny	Innstillinger	Klienter	Sven
↑ Slå av (sove) Gruppevalg Vibrasjon: På Lyd: Høy → Innstillinger	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Gruppeoppset ↓ Still klokke	→ Ny klient Sven Alle sendere	Rom 10 → TX901 Tilføy sender Gruppe valg Klientnavn ↓



Hovedmeny

Trykk på og samtidig, enten når skjermen er av eller på startskjermen, åpnes hovedmenyen. Den grønne pilen til venstre viser hvilken linje i menyen som kan velges.




Menybetjening:

Trykk for å flytte den grønne pilen enten opp eller til høyre i menyen.
 Trykk for å flytte den grønne pilen enten ned eller til venstre i menyen.
 Trykk for å gå ut av menyen.
 Trykk for å velge menyelementet med den grønne pilen ved siden av.

MERK: Etter ca 60 sekunder med inaktivitet, lukkes menyen automatisk.


Siste alarm:

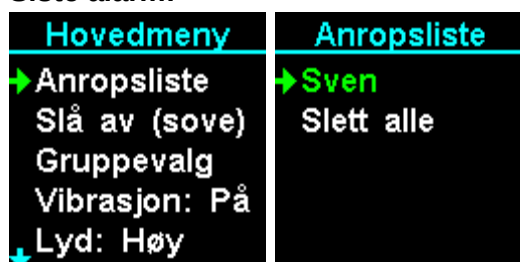

Bla mellom ulike alarmer.

GRØNN Betyr at alarmen ble akseptert.
RØD Betyr at alarmen ble avvist.
GUL Betyr at alarmen ble ubesvart.

Se mer informasjon om alarmene:

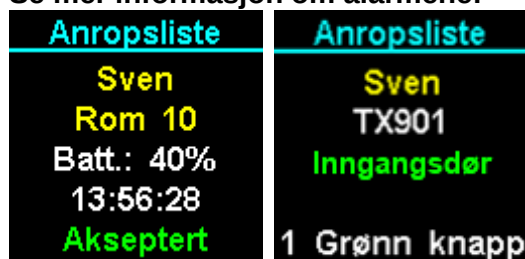

Se klientens posisjonering og hvilken sender alarmen kommer fra.

Bla mellom flere alarmer.



Ved mottak av alarm fra en sender som har f.eks. en melding om lavt batterinivå vises.

for å bla mellom andre alarmanrop.




Slett anropslisten:



Ent For å bekrefte.

Esc Gå tilbake til menyen.


Slå av (sove) mottakeren:

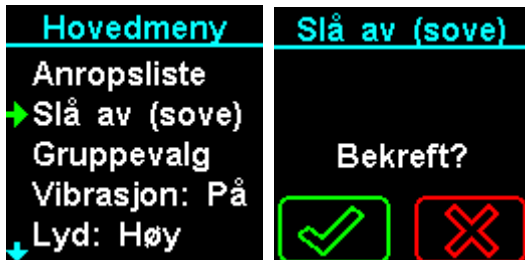

Ent For å bekrefte.

Esc Gå tilbake til menyen.

Valg av gruppe:

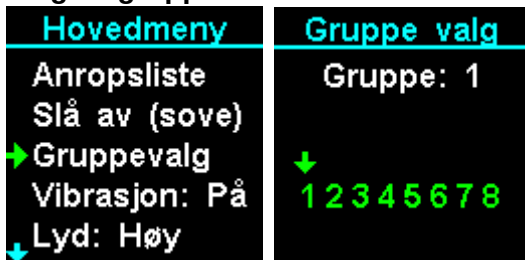


Ent Velge/oppheve valget av en gruppe.

Esc Gå tilbake til menyen.

↓ **↑** Velg gruppe.

1 Gruppen er valgt
1 Gruppen er ikke valgt


Vibratorfunksjon:

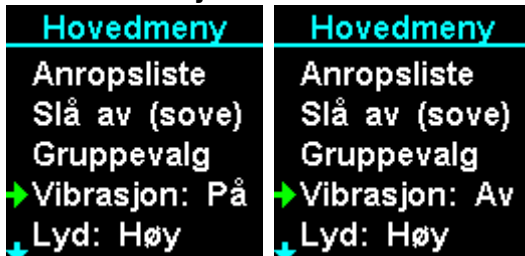

Ent Aktivere (På) eller deaktivere (Av) vibrasjonen.

Esc Gå tilbake til menyen.

Lydinnsstilling:

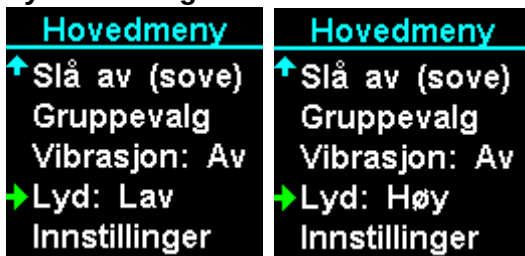

Ent Velge mellom **Høy**, **Lav** eller **Av**



Innstillinger og koding:

Hovedmeny	Innstillinger	Innstillinger	Innstillinger
↑ Slå av (sove) Gruppevalg Vibrasjon: Av Lyd: Lav → Innstillinger	Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Gruppoppsett ↓ Still klokke	↑ Klikk: Lav Produktnavn Passord → KNOP-knapp ↓ Posisjoner	↑ Passord KNOP-knapp Posisjoner Språk → Slå av

Ver: 3.3.14

Produktets programvareversjon.

ID: 58651

Produktets serienummer.

Legg til ny klient:

Innstillinger	Klienter
Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Gruppoppsett ↓ Still klokke	→ Ny klient Sven Alle sendere

Plasser pilen på menyvalget og trykk **Ent**.**Esc** Gå tilbake til menyen

Endre klient:

Innstillinger	Klienter
Ver: 3.8.1 ID: 123456 → Klienter Gruppoppsett ↓ Still klokke	Ny klient → Sven Alle sendere

Sven
Rom 10
→ TX901

Kundens navn.

Valgfri tekst, navn på f.eks. rom.

Produkt som allerede er kodet på klienten .



Legg til sender:

Sven Rom 10 TX901 → Tilføy sender Gruppe valg ↓ Klientnavn	Tilføy sender Aktiver ny sender... 
---	---

Aktiver nå ønsket sender.

Tilføy sender ID: 64067 RX901B Legg til?  

Godta utvidelser.

Tilføy sender Overfør fra: Arne Bekreft?  

Hvis senderen allerede er kodet, vil menyen nedenfor vises, slik at du kan flytte en sender mellom klienter.

Gruppe valg (klient):

Sven Zimmer 10 TX901 Tilføy sender → Gruppevalg ↓ Klientnavn	Sven Gruppe Gruppe: 1 ↓ 1 2 3 4 5 6 7 8
---	---

-   Flyt mellom grupper.
-  Velge gruppe.
-  Gå tilbake til menyen

-  Gruppe valgt.
-  Gruppe valgt bort.

Klientens navn :

Sven ↑ TX901 Tilføy sender Gruppe valg → Klientnavn ↓ Valgfri tekst	Klientnavn Lagre? ◆ 4 5 6 7 8 9 a b c d Sven Skriv inn klientnavn.
--	--

-   Flytte bokstav.
 -  Velge bokstav.
 -  Slett siste bokstaven.
- Lagre, velg symbol ◆ og trykk på .

Valgfri tekst:

Sven ↑ Ny sender Gruppe Klientnavn → Tekst ↓ Fjern	Sven Lagre? ◆ 4 5 6 7 8 9 a b c d Rom 10 Skriv inn klienttekst
--	---

-   Flytte bokstav.
 -  Velge bokstav.
 -  Slett siste bokstaven.
- Lagre, velg symbol ◆ og trykk på .



Fjern klienten:

Sven	Sven
↑ Tilføy sender	Ta bort:
Gruppevalg	Sven
Klientnavn	Bekreft?
Klienttekst	☐ ☐
→ Ta bort	

Ent Bekreft ta bort klienten.

Esc Gå tilbake til menyen



Endre kodet sender:

Klienter	Sven	Sven	Sven	Sven
Ny klient	Rom 10	TX901	Anropssignal 1	Anropssignal
→ Sven	→ TX901	ID: 35000	Sendertekst	Anropstekst
Arne	Tilføy sender	Ver.: 1.3	Anropssignal	Anrop:Alle
Alle sendere	Gruppevalg	Batt.: 40%	→ Anropstekst	Timer
	↓ Klientnavn	↓ Anropssignal 1	↓ Anrop:Alle	→ Ta bort

TX901
ID: 60372
Ver.: 1.0
Anropssignal 1

Produktnavn på senderen.
 Avsenders ID.
 Senderprogramvare versjon.
 Valgt anropssignal når alarm mottas.

Endre senderens tekst:

Sven	Sendertekst
↑ Anropssignal 1	Lagre?
Sendertekst	◆ 456789 a b c d
Anropssignal	Arm
→ Anropstekst	Skriv inn
↓ Anrop:Alle	sendertekst

Flytte bokstav.
 Velge bokstav.
 Slett siste bokstaven.
 Lagre, velg symbol ◆ og trykk på .

Endre anropssignalet:

Sven	Sven
↑ Batt.: 40%	TX901
Anropssignal 1	Anropssignal 1
Sendertekst	↓
→ Anropssignal	1 2 3 4 5
↓ Anropstekst	

Velge anropssignaler.
 Lagre nyt signal.
 Gå tilbake til menyen

Endre anropstekst:

Sven	1 Grønn knapp	1 Grønn knapp
↑ Sendertekst	Alarm knapp	Alarm knapp
Anropssignal	→ 1 Grønn knapp	→ 1 Grønn knapp
→ Anropstekst	2 Rød knapp	2 Rød knapp
Anrop:Alle	3 Gul knapp	3 Gul knapp
↓ Timer	↓ 4 Blå knapp	↓ 4 Blå knapp

Her er et TX901 eksempel.

Gjenopprett anropstekst:

Sven	Anropstekst	Anropstekst
↑ Sendertekst	↑ Ekstern 2	Nulstil tekster
Anropssignal	Ekstern 3	
→ Anropstekst	Ekstern 4	Bekreft?
Anrop:Alle	Batteri tom	
↓ Timer	→ Nulstil tekster	



Alarm:

Sven	Sven
↑ Sendertekst	↑ Sendertekst
Anropssignal	Anropssignal
Anropstekst	Anropstekst
→ Anrop:Normal	→ Anrop:Alle
↓ Timer	↓ Timer

- Ent** Veksle mellom **Normal** og **Alle**.
- Esc** Gå tilbake til menyen

Timerinnstilling av senderen:

Sven	Sven
↑ Anropssignal	→ Timer: På
Anropstekst	Start 1 00:00
Anrop:Normal	Stop 1 00:00
→ Timer	Start 2 00:00
Ta bort	Stop 2 00:00

- Ent** Veksle mellom **Av** og **På**.
- ↓** **↑** Endre tiden.
- Ent** Skift mellom timer/minutter.

Fjern senderen:

Sven	Sven
↑ Anropssignal	Ta bort:
Anropstekst	TX901
Anrop:Normal	Bekreft?
Timer	
→ Ta bort	 

- Ent** Bekreft ta bort senderen.
- Esc** Gå tilbake til menyen



Gruppeoppsetning:

Innstillinger	Gruppoppset
Ver: 3.8.1	Gruppe: 1
ID: 123456	
Klienter	↓
→ Gruppoppset	1 2 3 4 5 6 7 8
↓ Still klokke	

- Flyt mellom grupper.
 Velge gruppen.

Aktiveringstiden fra og til:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
→ Timer: På	→ Timer: Av
Gruppenavn	Gruppenavn
Timer	Timer

- Veksle mellom "Av" og "På".
 Gå tilbake til menyen.

Tips: Ikke glem å stille inn tiden i "innstillinger - still klokken".

Endre gruppenavn:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
Timer: Av	Lagre?
→ Gruppenavn	◆ 4 5 6 7 8 9 a b c d
Timer	Gruppe: 1
	Skriv inn gruppenavn

- Flytte bokstav.
 Velge bokstav.
 Slett siste bokstaven.
 Lagre, velg symbol ◆ og trykk på .

Endre aktiveringstiden:

Gruppe: 1	Gruppe: 1
Timer: Av	Start 07:00
Gruppenavn	Stop 15:00
→ Timer	

- Endre timer og minutter.
 Veksle mellom timer og minutter.
 Gå tilbake til menyen.

Still inn klokken:

Innstillinger	Still klokke
↑ ID: 123456	28-10-2022
Klienter	10:56
Gruppoppset	Automatisk
→ Still klokke	År: 2022
↓ Klikk: Lav	

- Endre.
 Veksle mellom år, måneder, klokkeslett, dato.

Merk: Hvis mottakeren mottar en klokkeoppdatering fra et KNOP-produkt eller USB901, stilles klokken automatisk deretter.



Tastatur klikk:

Innstillinger	Innstillinger
↑ Klienter	↑ Klienter
Gruppoppsett	Gruppeoppsett
Still klokke	Still klokke
→ Klikk: Lav	→ Klikk: Høy
↓ Produktnavn	↓ Produktnavn

- Ent Veksel mellom **Lav**, **Høy** og **Av**.
 Esc Gå tilbake til menyen

Endre mottakerens navn:

Innstillinger	Navn
↑ Gruppoppsett	Lagre?
Still klokke	◆ 456789 a b c d
Klikk: Lav	RX901C
→ Produktnavn	Skriv inn
↓ Passord	produktnavn

- ↑ ↓ Flytte bokstav.
 Ent Velge bokstav.
 Esc Slett siste bokstaven.
 Lagre, velg symbol ◆ og trykk på Ent.

Velg et passord:

Innstillinger	Passord
↑ Still klokke	Ny kode
Klikk: Lav	
Produktnavn	
→ Passord	Kode: 1234
↓ KNOP-knapp	

- ↑ ↓ Endre nummeret (0 til 9).
 Ent Velge nummer.
 Esc Slet siste sifferet.

Koden skal alltid være på 4 sifre.

Endre funksjonen på KNOP-logoen:

Innstillinger	KNOP-knapp
↑ Klikk: Lav	→ Anrop: Alle
Produktnavn	
Passord	
→ KNOP-knapp	
↓ Systemmeny	

- Ent Velg mellom **Frakoblet**, **Normal** eller **Alle**.



Tilkobling og endring av systemkode:

Innstillinger	Systemmeny
↑ Produktnavn	→ System: Från
Passord	ID: 0
KNOP-knapp	
→ Systemmeny	
↓ Posisjoner	

- Ent Veske system **Av** eller **På**.



Angi system-ID:

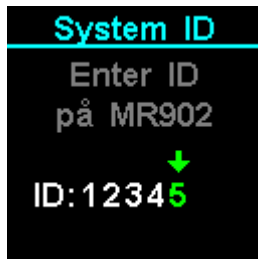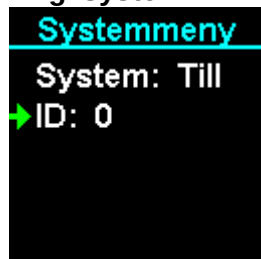

- Endre verdien (0 til 9).
- Velg nummer.
- Slette det siste sifferet.

Posisjoner:



Nåværende posisjon.
Allerede kodet.

Vis posisjon:



Viser gjeldende posisjon der du er.


Legg til posisjon:



Lagre posisjon

Merk at det mottatte må være innenfor rekkevidden til et posisjonsfelt.

Endre posisjonsnavn:

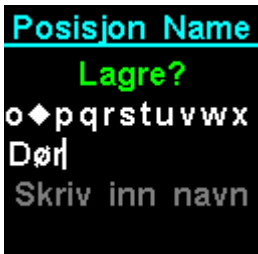

- Flytte bokstav.
- Velge bokstav.
- Slett siste bokstaven.
- Lagre, velg symbol ♦ og trykk på .



Fjern posisjon:



Trykk **Ent** for å slette posisjon.

Språk innstilling:



Flytte språkvalgpilen.

Ent Lagre valgt språk.

Slå av mottaker:



Ent Bekreft slå av.

Slå på mottakeren igjen ved å legge mottakeren på laderen.



Vedlikehold

Programvareoppdatering av RX901B:

Det er mulig å oppdatere programvaren i RX901B, samt å laste ned og overføre innstillinger ved hjelp av KNOptool. For ytterligere beskrivelser se KNOptool-manualen.

Rengjøring

Produktet kan rengjøres med en myk klut eller en tørkeklut.

Resevedele & tilbehør

Resevedele og tilbehør kan bestilles fra Knop Elektronik A/S, se www.knop.dk



Sjekk dekningsområdet

En person aktiverer en sender (for eksempel TX901) med korte mellomrom, mens en annen person går systematisk rundt i området og markerer på en skisse av bygget og området der det er dekning. Skissen er plassert på kontoret slik at alle som skal drifte systemet kan se hvor det er dekning. Utenfor dekningsområdet kan ikke alarmer mottas.

Dekningsområdet kan utvides ved hjelp av KNOP-repeatersystemet.

Kontakt din forhandler for mer informasjon.



Tekniske data

Batteri:	Litiumbatteri, LP 403040 3,7V 450mA
Driftstid med batteri:	Ca. 3 dager med 50 alarmanrop per dag.
Opplasting:	Trådløs, ca. 4 timer .
Strømforsyningsenhet:	230VAC adapter USB 5VDC/1.0A
Frekvens HF:	869,2125 MHz ⁽¹⁾
Rekkevidde :	Opptil 1500 m fri rekkevidde for en RX901B ⁽²⁾
Skjerm:	Grafisk LCD
Menytekster:	dansk, norsk, svensk, finsk, engelsk.
Loggfunksjon:	Lagrer de siste 50 alarmanropene.
Minne:	250 sendere 150 stillinger POS901
Omgivelse:	Innendørs bruk. <90 % fuktighet uten kondens.
Omgivelsestemperatur :	0 - 40°C
Skaptype:	Farge RAL9003 ABS
Skapmål:	45 x 90 x 16 mm. Inkl. nakkestropp med sikkerhetslås som ryker ved trekk.
Tetthet:	IP65
Vekt inkl. batterier:	56g

Retten til endringer forbeholdes

Alle rettigheter forbeholdt.

© **KNOP** Elektronik A/S

⁽¹⁾ Ved tilkopling til KNOPs repeatersystem brukes også 868.049 /100/150 MHz.

⁽²⁾ Målt utendørs med fri sikt mellom sender og mottaker. I bygninger reduseres rekkevidden.

Symbolforklaring og godkjenninger

	Dette produktet er i samsvar med disse direktivene og standarder: Directive 2017/745/EU MDR Directive 1907/2006/EU REACH Directive 2011/65/EU RoHS Directive 2012/19/EU WEEE ISO 14971:2019 Risk Management for Medical devices EN 301 498-1 V2.2.3 Electro Magnetic Compatibility EN 301 489-3 V3.1.1 Electro Magnetic Compatibility EN 50130-4:2011 + 2014 Immunity alarm systems EN 300 220-1 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-2 V3.1.1 Short Range Devices EN 300 220-3 V2.1.1 Short Range Devices EN 60601-1-2:2014 + 2015 Electromagnetic compatibility (Medical) EN 62368-1:2020 Electrical safety EN 50581:2012 Hazardous substances
	Produktet må ikke brukes hvis emballasjen er skadet.
	Medisinsk produkt Klasse 1, regel 1
	Produsent KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer, Danmark
	Les manual(er) før installasjon og igangkjøring se www.knop.dk .
	Interferens kan oppstå i omgivelser med utstyr merket med dette symbolet.
	Må beskyttes mot væske.
	0 °C til +40 °C, temperaturgrense for transport/lagring og bruk.
	Produktet må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
	Individuelt registreringsnummer DK-MF-000025631
	Unik enhetskode for å identifisere enheten 05744002850298
	Produktreferanse/produktnummer Mottaker RX901B, inkl. trådløs lader
	Serienummer Plassert på produktet
	IP-klasse IP65