



Repeater PRC2000RP



Repeater PRC2000RP

Repeater PRC2000RP er en 4-kanals sender / modtager. Den passer sammen med Knop's øvrige trådløse hjælpemidler, som f.eks. Sender TX-2000, Epilepsialarm EPI-2000, Dørkald DV-2000, Pustekontakt PU-2002, smykkesender TX-811, og armbåndssender, mm.

PRC2000RP

Repeater PRC2000RP:

Repeateren modtager signalerne fra KNOP ELEKTRONIK'S øvrige produkter, og sender dem videre til lomme-modtageren PRC2020V.

Inde i repeateren sidder en 8 polet dipswitz på modtagerdelen. Den bruges til at kode systemet sammen med de sendere den skal bruges sammen med.

Rækkevidden er op til 50....75 meter mellem sender og repeater, afhængig af bygningens konstruktion og hvilken type sender, der anvendes. Små sendere som f.eks. Smykkesendere har kortest rækkevidde.

Rækkevidden mellem repeater og lommemodtager er op til 500 m.

Repeateren hænges op på væggen, og netadapteren sættes i stikkontakten. Antennen gøres fast på væggen, så den sidder lodret.

På bunden af repeateren sidde en rød trykknop. Den lyser når repeateren sender til modtageren. Hvis man trykker på knappen sender repeateren et kald på kanal 4. (Løbelys på modtageren), Begge dele kan bruges til at teste anlægget.

Modtager PRC2020V:

4 kanals modtager med visning af kald på lysdioder samt lyd / vibrator.

Ved batterialarm på modtageren blinker grøn diode og dobbelt beep høres hver 15 sek. Anvender 1 stk. batteri type: Lr6 el AA 1,5 volt "**Alkaline**". Drifttid er cá. 2 måneder.

Eksempel:


EPI-2000 med trådløs overførsel via PRC2000RP til PRC2020V



EPI-2000
Epilepsialarm



PRC-2000RP
Repeater

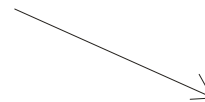

PRC-2020V
Modtager

PRC-2000RP

KNOP ELEKTRONIK

Fabriksvej 20, 7600 Struer. email: knop@knop.dk www.knop.dk . Tlf: 97840444 . Fax: 97840666