



## Pager RX-300



Pager RX-300 anvendes som trådløs lommemodtager, hvor der er brug for, at modtage kald fra op til 99 forskellige beboere, eller personalet i mellem.

Pager RX-300 har indbygget vibrator og lyd giver.

Pager RX-300 leveres med genopladelige batterier og lader.

Pager RX-300 husker de 8 sidste kald.

Pager RX-300 modtager både 12 bit koder og powercode.

# Pager RX-300

## Anvendelse:

Pager RX-300 anvendes til modtagelse af kald fra KNOP ELEKTRONIK'S øvrige trådløse produkter feks. smykkesender, epilepsialarm, ledsagerkald, dørvagt, sengevagt mm.

## Betjening:

Hele betjeningen sker med omskifteren på toppen af modtageren.

Stilles omskifteren på OFF er modtageren slukket.

I den midterst ON-stilling er modtageren tændt med vibrator.

I den venstre ON-stilling er modtageren tændt med lyd.

Omskifteren trykkes ned for at afstille modtageren. (Samtidig vises nummeret for den, der har kaldt op.)

## Tænd modtageren:

Stil omskifteren på "ON" og micropageren er klar til brug.

## Opkald:

Bipperen lyder, tryk knappen ned og se kaldnummeret i displayet. Micropageren er nu resat og klar til næste opkald.

## Batterialarm:

Hver gang man har modtaget en alarm checkes batteriet i pageren.

Ved lav batterispænding i pageren vises skiftevis bA (battery) og LO (low) i displayet, imens den beeper.

## Batteriopladning:

Pager RX-300 leveres med genopladeligt batteri, samt netadapter til opladning.

## Eksempel:

Pager RX-300 kan bruges som trådløs modtager for EPI-2000.



EPI-2000  
Epilepsialarm



Pager  
RX-300

## Eksempel:

Pager RX-300 sammen med smykkesender, til modtagelse af kald fra beboer/personale.



Pager  
RX-300