


KNOP



# Brugervejledning for Bedwetting alarm

# BW900

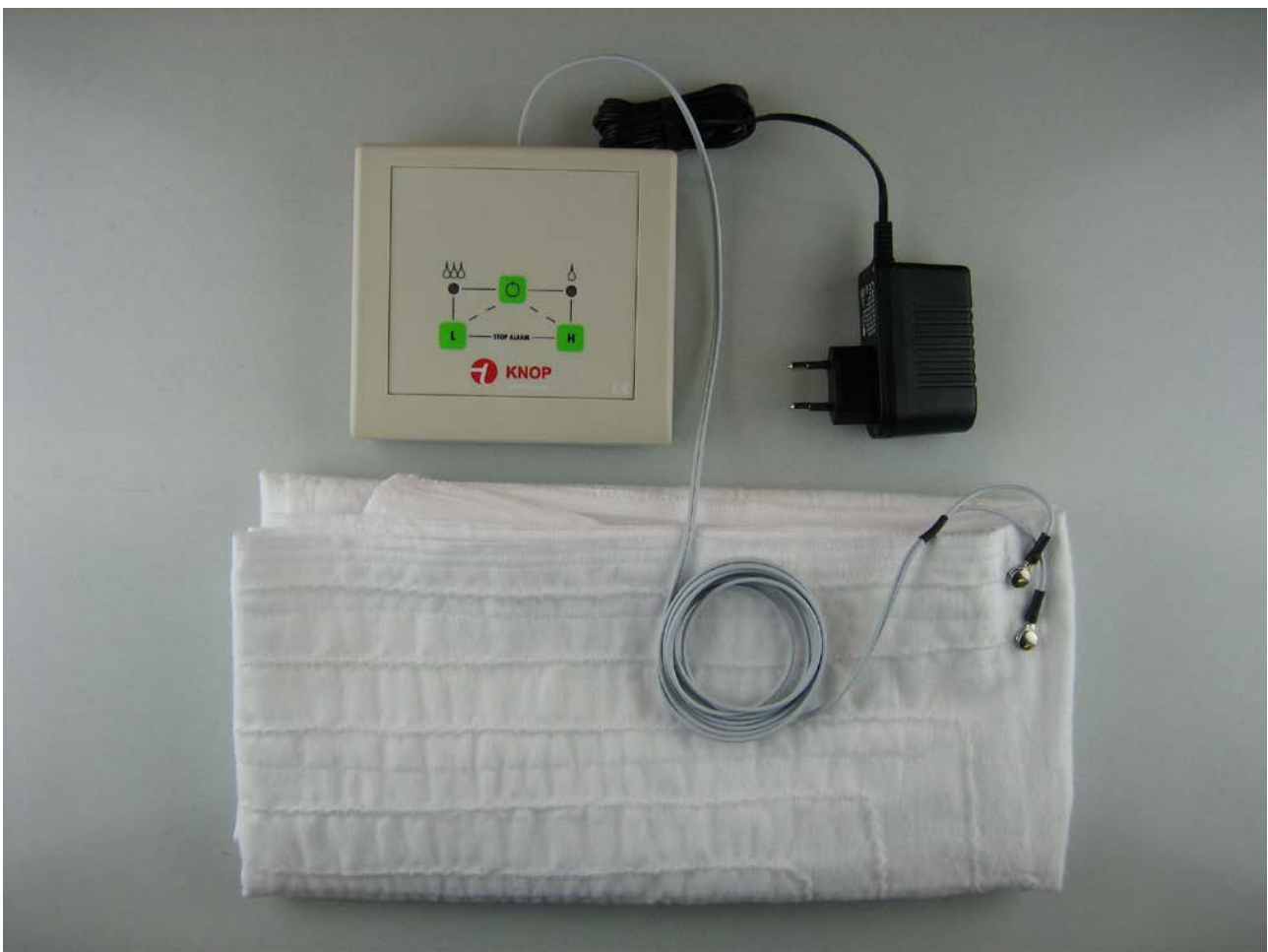

**KNOP ELEKTRONIK A/S**

Fabriksvej 20 ● DK-7600 Struer ● knop@knop.dk ● www.knop.dk ● Tlf.: +45 97840444 ● Fax.: +45 97840666

## **Indhold:**

<b>Tilsigtet anvendelse af BW900</b>	<b>side 3</b>
<b>Før start</b>	<b>side 3</b>
<b>Opredning</b>	<b>side 3</b>
<b>Indstilling af fugtfølsomhed</b>	<b>side 3</b>
<b>Når alarmen lyder</b>	<b>side 3</b>
<b>Placering af knapper og tilslutninger</b>	<b>side 4</b>
<b>Vaskeanvisning af Flonel-lagenføleren</b>	<b>side 5</b>
<b>Skema</b>	<b>side 6</b>
<b>Afslutning</b>	<b>side 6</b>
<b>Kontrol af dækningsområde</b>	<b>side 7</b>
<b>Relæudgang</b>	<b>side 7</b>
<b>Rengøring</b>	<b>side 7</b>
<b>Bortskaffelse</b>	<b>side 7</b>
<b>Tekniske data</b>	<b>side 8</b>

## Tilsluttet anvendelse af BW900:

BW900 er en trådløs alarm, som er designet til at sende koder, til en modtager i KNOP's 900-serie.

Transmissionen sker når BW900 alarmeren bliver aktiveret. Vær opmærksom på rækkevidden som er beskrevet i afsnittet "Kontrol af dækningsområde".

## Før start:


Det er vigtigt at barnet bliver fortrolig med alarmeren og lærer at tænde og slukke alarmeren. Afprøv alarmeren sammen med barnet ved at holde de to tryklåse på ledningen sammen. Ønskes vækkelyden højere eller lavere, indstilles volumenknappen på BW900's bagside.


## Opredning:

BW900-S anbringes ovenpå den almindelige opredning med trykhægterne opad.

Barnet bør sove direkte på lagenføleren.

Stik endestykkerne ned om madrassen, således at lagenføleren ligger fast.

Tilslut alarmeren til lagenføleren og tænd på  knappen.

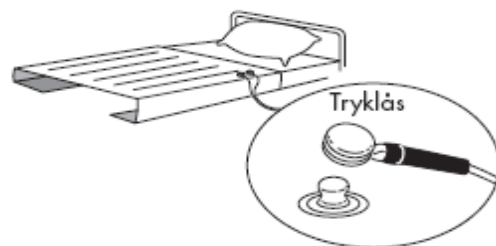

## Indstilling af fugtfølsomhed:

BW900 kan indstilles til at vække/sendte, ud fra en lav eller høj fugtfølsomhed.



Ved valg af lav fugtfølsomhed reagerer alarmeren først ved større fugtmængder.

Lav fugtfølsomhed anvendes normalt kun, hvis barnet sveder meget.

Følsomhedsniveau ændres ved at holde  eller  nede og trykke kortvarigt på .

## Når alarmeren lyder:



Når alarmeren vækker, skal barnet selv afbryde alarmeren og gå på toilettet for at tømme blæren helt.

Vækkelyden slås fra ved samtidig at trykke på  og  knapperne.

Skift den våde lagenføler ud med en tør lagenføler og tilslut igen ledningen med tryklåsene på lagenfølerens hægter.

Kontroller at BW900 viser grønt lys som indikation på, at den er klar til brug. Hvis BW900 lyser rødt, er den i alarmtilstand.

## Placering af knapper og tilslutninger:

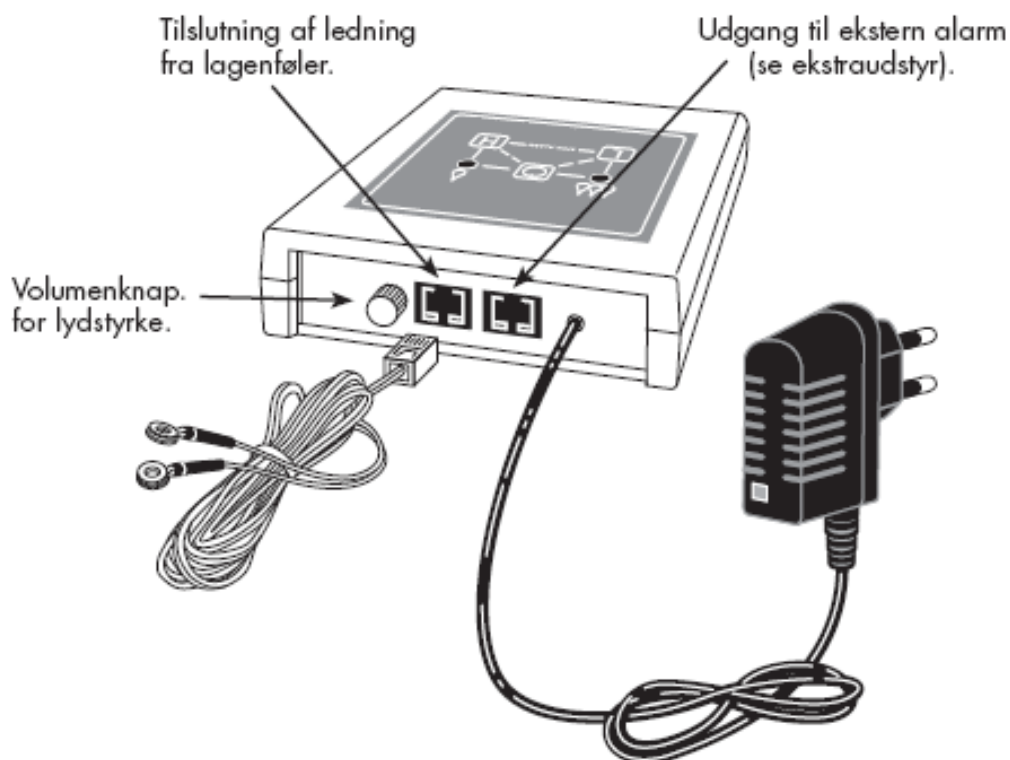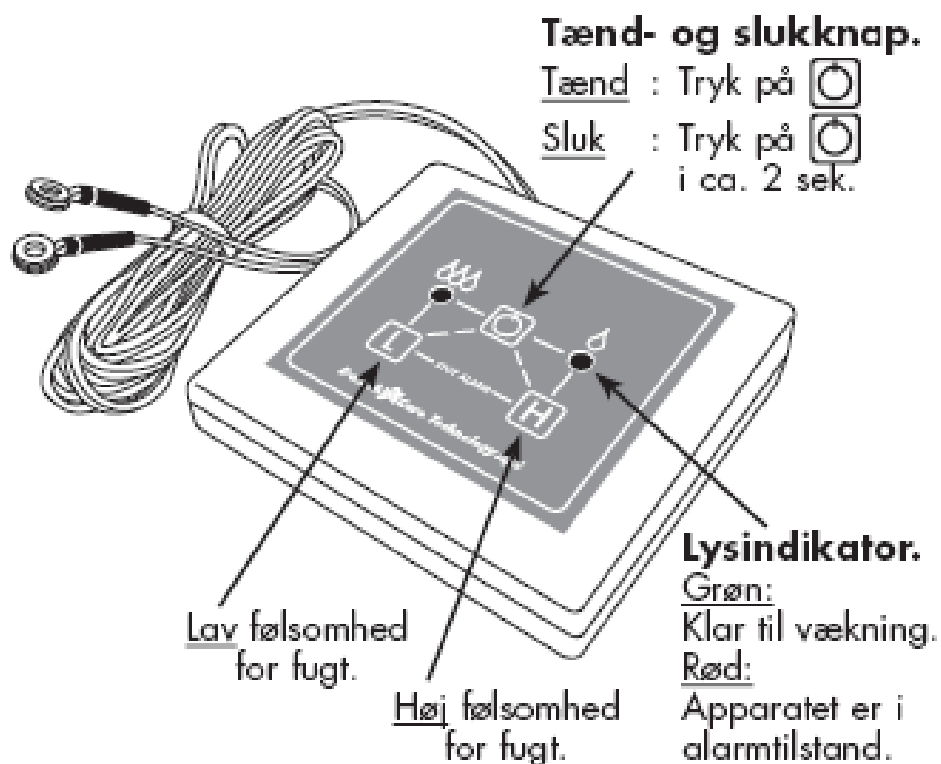

## Vaskeanvisning af Flonel-lagenføleren:



Normal maskinevask ved højst 40°C.



Høj temperatur, dog højst 200°C.



Tåler ikke tumblertørring.



Må ikke centrifugeres.



## Kontrol af dækningsområde:

En person aktiverer BW900 (ved at holde de to tryklåse sammen) med korte mellemrum, mens en anden går systematisk rundt i området og afmærker på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning. Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer.

Dækningsområdet kan øges ved brug af et repeatersystem fra KNOP Elektronik. Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.

## Relæudgang:

Relæudgangen som findes på BW900, er en potentialfri udgang, som er ført ud i et 8 polet modularstik på ben 3 og 8, for tilslutning til andet udstyr f.eks. kaldeanlæg mm. Se også ”Tekniske data”

**OBS: De øvrige ben, 1 og 2 samt 4 til 7 må ikke benyttes.**


## Rengøring:

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

## Bortskaffelse:



Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

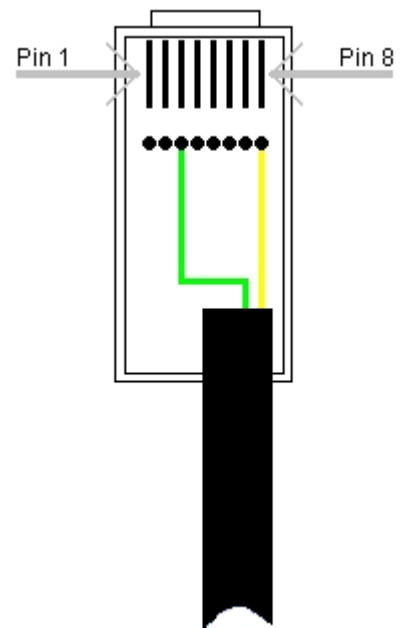

## Tekniske data BW900:

<b>Frekvens:</b>	869.212 MHz (FM)
<b>Sender protokol:</b>	KNOP900
<b>Rækkevidde:</b>	> 50m afhængig af forholdene
<b>Strømforsyning:</b>	AC/DC adapter, 12V 700mA
<b>Omgivelse miljø:</b>	Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke kondenserende.
<b>Omgivelse temperatur:</b>	0-40° C
<b>Kabinet type:</b>	Hvid ABS
<b>Kabinet dimensioner:</b>	H: 44 mm, B: 138 mm, L: 127 mm.
<b>Tilslutninger:</b>	6 pol modular: Tilslutning lagenføler 8 pol modular: Potentiale fri relæudgang mellem ben 3 og 8. Max 24V/1A. Øvrige ben må ikke benyttes.

## Flonel-lagenføler:

<b>Størrelse:</b>	140 x 70 cm
<b>Følsomhedsområde:</b>	Ca. 65 x 65 cm
<b>Levetid:</b>	Det anbefales at have 2 stk. lagener til 1 behandlingsperiode

## Tilbehør:

Produkt:	<b>Flonel-lagenføler.</b>
Varenummer:	<b>BW900S.</b>
Produkt:	<b>Ekstern følerledning.</b>
Varenummer:	<b>BW900L.</b>



Udfyld skemaet ved at sætte kryds i rammen under TØR, for hver nat barnet sover uden at tisse i sengen.

Har barnet tisset i sengen, udfyldes rammen under VÅD, med et kryds for våd  og en cirkel for meget våd.

Der er 2 rammer ved VÅD, brug begge rammer, hvis barnet tisser i sengen flere gange.

Kommentar kan være: Sov igennem! Stod op u/alarm! Sov ude! m.m.

Skemaet er vigtigt for at kunne følge udviklingen. Endvidere vil det være en hjælp for Deres sundhedsplejerske og læge, under opfølgning og afslutning.

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

TØR	VÅD	VÅD	KOMMENTAR
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			