

# Bruksanvisning EPI900-S / Epi-Sond



# Bruksanvisning för separat vibrationssond till EPI-900

## 1.1.1 Allmänt

Vibrationssonden är en separat ”känseldele” som ansluts till anfallsalarm EPI-900. Sonden ansluts till det ÖVRE uttaget på EPI-900 och används i de fall när EPI-900 inte kan hängas under sängen eller när man vill registrera ”små lätta” skakningar hos en person.

## 1.1.2 Placering

Sonden placeras lämpligen mellan madrass och underlakan i närheten av den kroppsdel som har de tydligaste skakningarna.

**OBS! Sonden är märkt med ”Denne side op” (Denna sidan upp) och skall så placeras i sängen!**  
EPI-900 kan nu placeras vid sidan av sängen (behöver således ej hänga under sängen) så att det blir lätt att komma åt inställningarna.

## 1.1.3 Inställning

Följ bruksanvisning för EPI-900. Viktigt är att följa inställning av PULS – alltså antalet skakningar som EPI-900 skall larma vid. Eftersom den separata vibrations-sonden är mycket känslig är det viktigt att rätt värde ställs in så att inte alltför många ”falsklarm” erhålls.

## 1.2 Miljö

Produkten innehåller elektronik.

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall återvinnas som el-avfall.

Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall.



## 1.3 Tekniska data

Artikelnr:	EPI900S
Batterier:	Inga
Kapslingsklass:	IP67
Färg:	Vit
Beräknad livslängd:	6 år

