

Bruksanvisning för Vibrator VIB-2004



Vibrator VIB-2004 placerad under kudden kommer att vibrera när RX901C ger ett larm. Personen kan således vakna utan ljud i form av vibrationer. Sängvibratoren är försedd med en 3,5 mm jack.

Installation:

1. Anslut sängvibratoren genom att sätta i kontakten i anvisat uttag på kompatibel mottagare.
2. Testa larmsystemet och kontrollera att sängvibratoren vibrerar.
Observera att det inte hörs någon signal från mottagaren.

Det rekommenderas att använda en extern nätadapter till mottagaren då antalet av vibrationer ökar från 3x3 sekunder vid batteridrift till 5 min vid drift med nätadapter.

Produktbeskrivning:

1. Glidskydd
2. Kontakt

