



For Patienter, der ikke kan betjene for eks. trækkontakter.
For patienter, der er udsat for krampeanfald

Lydaktiveret kald LAK-821HF



Et godt hjælpemiddel for patient og personale.

Lydaktiveret kald, LAK821-HF, er beregnet til at hjælpe patient og personale til at få melding i en situation, hvor patienten ikke kan aktivere et kaldeanlæg på anden måde.

For Patienter, der ikke kan betjene for eks. Trækkontakter. For patienter, der er udsat for krampeanfald

Indregulering af enheden sker ved hjælp af de to knapper mærket (5) og (2).

Knop (5) regulerer styrkeniveauet, det nivo man ønsker alarm ved.

Knop (2) regulerer den tid, lydniveauet skal være tilstede - inden LAK-821-HF afgiver alarm.



Betjening og indstilling.

LAK821-HF kan indstilles til at være super følsom med øjeblikkelig alarm.





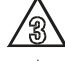




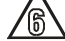
På niveauregulering knap (5) indstilles følsomheden. Drejet helt venstre om er følsomheden minimum, drejet helt til højre størst følsomhed.

På knap (2) indstiller man forsinkelsen. Forsinkelsen er den tid man ønsker, at lydniveauet som man har indstillet på knappen (5), skal holdes inden der sendes alarm. Dette for at forhindre mange fejlalarmer på grund af udenomsstøj.

Tiden kan indstilles fra 0 til 7 sekunder.

Hver gang der afgives en melding, lukker enheden i 90 sekunder for yderligere meldinger. Dette sikrer at andre alarm-enheder kan komme igennem.

NB: er der brug for det kan denne tid nedsættes til 2-3 sekunder.

- | | | | |
|---|-----------------------|---|---|
|  | Lydsensor indbygget. |  | Power strømfors. (St762-B) incl. |
|  | Tidsforsinkelse. |  | Relæudgang med sluttefunktion |
|  | Alarmlampe. |  | Extern mikrofon (MI821) |
|  | Reset knap. |  | LAK-821HF har indbygget UHF sender til trådløs overførsel af alarm. |
|  | Følsomhedsregulering. | | |
|  | Sensor lampe. | | |

KNOP ELEKTRONIK

Fabriksvej 20, 7600 Struer. email: knop@knop.dk www.knop.dk . Tlf: 97840444 . Fax: 97840666