



KNOP
REHATEK

Vibrator VIB-2004



KNOP Rehatek's vibrator VIB-2004 kan användas till flera av våra produkter, bland annat RX-900-2 samt RX-2004, för att erhålla väckning i form av vibrationer.

Gör så här!

1. Anslut sängvibratorn genom att sätta i kontakten i anvisat uttag på kompatibel mottagare.
2. Testa larmsystemet och kontrollera att sängvibratorn vibrerar. Observera att det inte hörs någon signal från mottagaren.

Det rekommenderas att använda en extern nätadapter till mottagaren då antalet av vibrationer ökar från 3x3 sekunder vid batteridrift till 5 min vid drift med nätadapter.

Produktbeskrivning:

- 1) Glidskydd
- 2) Kontakt

