

KNOP



Bruks- & skötselanvisning

Larmmatta



KNOP AB

knop@knop.se • www.knop.se • +46 (0)35 350 00

1 Introduktion

KNOP Rehatek's larmmatta TR530, består av en larmmatta som är i svart plast samt en skyddsmatta som är en normal "hallmatta" med halkskydd, som tillsammans bildar en ficka där larmmattan passar.

Larmmattan får inte användas separat utan antihalkskydd och mattöverdrag.

Larmmattan och skyddsmatta går att beställa separat med följande artikelnummer:

Larmmatta i svart plast: TR520

Skyddsmatta i tyg:TR510

2 Skötsel och användning

1. Larmmattan får ej användas utan att den täcks över av en annan matta typ gång- eller sängmatta. Lägg också ett halkskydd under mattan så att den inte glider undan (finns att köpa i alla mattaffärer). Vi rekommenderar att man använder vår skyddsmatta (art.nr TR510) som är anpassad och utprovad ihop med larmmattan och där halkskyddet är integrerat i skyddsmattan.

2. Placera larmmattan där användaren förväntas sätta ned fötterna.

3. Anslut kontakten till befintligt ringledningsuttag – i vissa fall måste kontakten bytas så att den passar i avdelningens uttag – kontakta tekniker/vaktmästare eller KNOP Rehatek. (Finns det inget ringledningsuttag se punkt 4)

4. För att användas tillsammans med KNOP Rehatek's trådlösa larmsystem måste larmmattan anslutas till en trådlös sändare.

5. Rengör larmmattan endast med mild tvållösning och fuktad trasa. Larmmattan får ej autoklaveras!

6. Skyddsmattan är en normal "heltäckningsmatta" med integrerat halkskydd som rengörs med dammsugare eller mild tvållösning. Den kan tvättas vid max 30°, och var noga med att välja ett skonsamt tvättprogram. Vid kraftig nedsmutsning byts hela skyddsmattan med art.nr TR510.

7. Hantera larmmattan varsamt! – Undvik att dra i sladden – särskilt vid infästningen i mattan. "Skrynkla" ej ihop larmmattan.

Garantin gäller ej om något av ovanstående skötselråd inte följs.

3 Miljö

Produkten innehåller elektronik.

När produkten är förbrukad får den inte kastas med vanligt hushållsavfall utan skall återvinnas som el-avfall.

Kontakta din kommun om du inte vet var du kan lämna in el-avfall.

4 Tekniska data

Artikel nr:	TR520, Larmmatta i svart plast, 43x75cm TR510, Skyddsmatta i tyg f. larmmatta TR530, Set av larmmatta och skyddsmatta
Anslutning:	6,3mm telepropp hane, sladdlängd 3m. Potentialfri switch. Max. 36V/100mA.

Rätt till ändringar förbehålles.

