

Brugervejledning LAK901





Indholdsfortegnelse

Advarsel og sikkerhedsforskrifter	3
Tilsluttet anvendelse	4
Ibrugtagning	5
Lysdioden	5
Tilslutninger	6
Startskærm	7
Alarmopkald	8
Batterialarm	8
Hovedmenu	9
Hovedmenu - Sluk (dvale)	10
Hovedmenu – Indstillinger	11
Hovedmenu - Indstillinger - Følsomhed	12
Hovedmenu - Indstillinger - Tidsstyring	16
Hovedmenu - Indstillinger - Avanceret	18
Hovedmenu - Indstillinger - Indstil ur	23
Hovedmenu - Indstillinger - Trådløs	24
Hovedmenu - Indstillinger - Sluk	26
Vedligehold	27
Rengøring	28
Kontrol af dækningsområde	28
Reservedele og tilbehør	28
Tekniske data	29
Symbolforklaring og godkendelser	30



Advarsel og sikkerhedsforskrifter



- Batteriet i dette produkt overholder de relevante IEC-sikkerhedsstandarder for batterier.
- Læs sikkerhedsforskrifterne på strømforsyningsenheden inden brug.
- Strømforsyningsenheden skal overholde de relevante IEC-sikkerhedsstandarder.
- Ved udskiftning af strømforsyningsenheden skal anvendes originale eller/og godkendte enheder.
- Batteriet må ikke udskiftes, produktet skal sendes til reparation.
- Hvis batterirummet ikke kan lukkes forsvarligt, skal produktet kasseres og holdes væk fra børn.
- Læs tilsigtet anvendelse inden ibrugtagning.



Tilsluttet anvendelse

LAK901 er designet til at sende koder til KNOPs trådløse modtagere.

Transmissionen sker, når LAK901 registrerer en lyd i et bestemt niveau. Vær opmærksom på rækkevidden som er beskrevet i afsnittet "Kontrol af dækningsområde".

LAK901 er beregnet til at hjælpe klienter i situationer, hvor klienten ikke kan aktivere et normalt kaldeanlæg, men kan kalde med lyd.

LAK901 er udstyret med positionslæser, således produktets aktuelle position kan anvendes i KNOP's positionssystem.

Det er med LAK901 muligt at foretage et nødkald til en kollega med et enkelt tryk på KNOP logoet.

Betjeningen er menu opbygget i en grafisk skærm og betjenes på tastaturet.

LAK901 er med opladeligt batteri og kan oplades med et mikro-USB-kabel.

Det er muligt at tilsluttet ekstern mikrofon og ekstern monitor med højttaler. Begge dele fås som tilbehør.




Ibrugtagning

Det anbefales, at LAK901 oplades til 100 % eller tilsluttes strømforsyning permanent, før det ibrugtages.

LAK901 tilsluttes oplader. Ved tilslutning af oplader tænder produktet automatisk, hvis det er slukket, ellers tryk kort på **Ent** og produktet tænder.

Første gang produktet tændes, skal det ønskede sprog vælges.

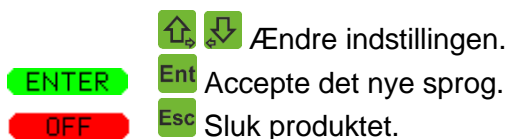

Lysdioden

Lysdioden indikerer:

Grøn:	Sender telegram.
Grøn blink:	Telegram modtaget.
Rød blink:	Telegram ikke besvaret.
Kort rødt blink:	Lavt batteri, genoplad batteriet.
Kort grønt blink:	Produktet er i dvale (dog ikke, hvis lysfunktionen er indstillet til slukket).

Tilslutninger

Der er fire stik i produktet.

1. Ekstern relæudgang og ekstern strømforsyning.
2. Tilslutning til LAK901M, ekstern lyttemonitor.
3. Ekstern KNOP mikrofon 3,5mm Minijack.
4. Opladerstik, mikro-USB.



Ekstern udgang/strømforsyning.

Stik til LAK901M

Ekstern mikrofon.

Mikro USB-oplader.


1. Minus
- 2.
3. 8-15V @100mA
- 4.
- 5.
- 6.
7. Relæ (NO)
8. Relæ (COM)








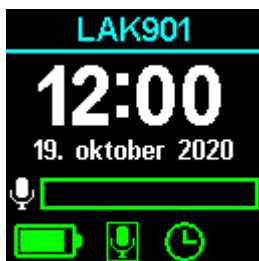

Startskærm

Første gang enheden skal tændes efter udpakning, skal opladeren tilsluttes.

Skærmen slukker automatisk efter ca. 15 sekunder efter sidste betjening.
Ved tryk på en af tasterne tænder displayet, hvorefter ur og dato vises samt status.
Øverst vises navnet på brugeren, hvis denne er indkodet.

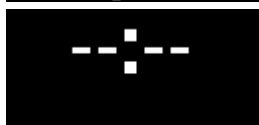

Startskærmens muligheder:

	Navn på f.eks. produktet eller sted kan ændres til det ønskede.
	Aktuel tid og dato vises med hvid tekst.
	Uret skal indstilles.
	Mikrofonstatus og aktivering.
	Mikrofon aktiveret og tidstagning startet.
	Tidstagning opnået og alarm sendes.
	Spærretid aktiveret, mikrofonalarm ikke mulig.



Oplader er tilsluttet.



Batteriet er opladet.



Opladning tilrådes.



Batteriet er næsten brugt, og skal oplades snarest.



Ukendt batteristatus, vent et øjeblik.



Intern mikrofon tændt.



Intern mikrofon slukket.



Ekstern mikrofon tændt.



Ekstern mikrofon slukket.



Timer er aktiveret og **indenfor** aktiv periode.



Timer er aktiveret og **udenfor** aktiv periode.



Timer er deaktiveret.



Alarmopkald

Det er muligt at sende enten et panikopkald eller alarmopkald fra produktet til f.eks. personale for at indikere "jeg har brug for hjælp" hos en klient eller som overfaldsalarm.

Opkaldet skal kvitteres fra en modtager, hvorefter der vises "OK". Sker det ikke vises "MISLYKKET". Hvis opkaldet mislykkes, gentages opkaldet to gange automatisk.

Se under "Hovedmenu - Indstillinger – Trådløs" for indstilling af opkaldet.

Opkaldet aktiveres ved at trykke på KNOP-logoet.

Panikopkald




Opkald sendes

Opkald mislykket

Opkald modtaget

Alarmopkald

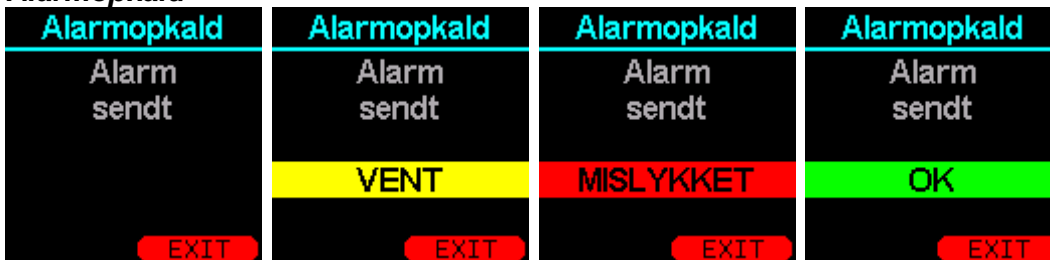




Opkald sendes

Modtager optaget


Opkald mislykket

Opkald modtaget

Batterialarm



-  Batteriet er opladet.
-  Opladning tilrådes. Batteriet er næsten brugt, og skal oplades snarest.
-  Skifter symbolet til rødt, bør man straks tilsluttet opladeren.

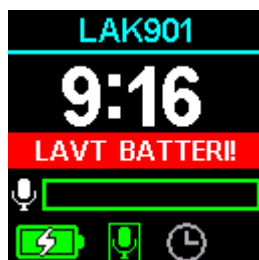Samtidig kommer der et par korte biplyde ca. hver 5. minut, som indikerer lavt batteri, samtidig med at nedenstående skærm vises:









Hovedmenu





Ved at trykke på  og  samtidigt og holde dem nede i 1 sekund, enten ved slukket skærm eller i startskærmen, fremkommer hovedmenuen. Produktet skal dog være tændt.

Generel betjening i menuen



  Aktuel funktion af  .

I dette eksempel er  knappens funktion  (accepter) og  knappens funktion  (afbryd/forlad menu)

 **Sluk (Dvale)** Den grønne pil viser, hvilket menupunkt, der kan vælges ved tryk på .
Tryk på   for at flytte den grønne pil enten op/ned eller til højre/venstre i menuen.

Bemærk: Efter ca. 30 sekunders inaktivitet forlades menuen automatisk.



Hovedmenu - Sluk (dvale)



ENTER Vælg menupunktet **Sluk (Dvale)** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



YES **Ent** Acceptere.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Produktet tændes igen ved at trykke på **Ent** tasten.

Ønskes modtageren slukket helt, kan dette gøres i menupunktet " Indstillinger ➔ Sluk".

Dvale kan bruges, hvis man i en periode ikke ønsker opkald fra produktet.
Dvale bruger mere strøm end sluk funktionen.



Hovedmenu – Indstillinger



- ENTER** Vælg menupunktet **Indstillinger** og tryk **Ent**.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.

Er der programmeret en adgangskode, skal denne nu indtastes.



- ENTER** **Ent** Vælg tallet.
- BACK** **Esc** Slet det sidste ciffer eller returner til hovedmenuen.

Ved forkert kode:

- CANCEL** **Ent** Prøve igen.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.

Indstillingsmenuen vises nu:



Der vises software version og produktets ID i de to første linjer, disse kan ikke ændres.

- S/W: 1.0.0** Software version.
- ID: 12345** Produktets ID og serienummer.

- ENTER** Vælg et menupunktet og tryk **Ent**.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.



Hovedmenu - Indstillinger - Følsomhed


Indstil mikrofonens følsomhed og aktiveringstid.



ENTER Vælg **Mikrofon** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



Følsomhed kan indstilles imellem 0 – 100 % og aktiveringstiden 0 – 5,0 sekunder.

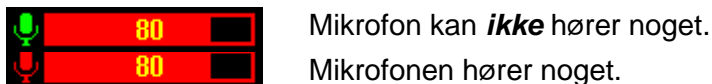



↑ ↓ Ændre følsomheden på mikrofonen.
NEXT **Ent** Næste indstilling.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



Aktiveringstiden kan sættes imellem 0 og 5,0 sekunder.

↑ ↓ Ændre aktiveringstiden på mikrofonen.
NEXT **Ent** Næste, afprøv indstillingerne.
BACK **Esc** Forlad menuen.



Aktivere mikrofon med den ønskede lyd. Mikrofonikonet viserrødt  når der høres noget. Så snart der høres noget starter aktiveringstiden, og der skal høres noget hele tiden, i den indstillede tid, ellers starter tiden forfra. Høres der noget i hele perioden bliver timeglasset rødt  svarende til en alarm aktivering.





Mikrofon frekvensfilter

Frekvensfilterne anvendes til at dæmpe uønskede lyde eller støj. Alt efter hvilke lyde klienten skal kunne tilvejebringe, kan man med fordel stille filterne til at optimere dette. Hvis det f.eks. kun er muligt at sige lyde som f.eks. O og B ligger disse i området 500Hz, og så kan man med fordel sætte filerne til 250Hz (basfilter) og 1000Hz (diskantfilter) for at netop disse lyde er dominerende. Er det gengæld hvislelyde f.eks. S og T er 2000Hz (basfilter) og 6000Hz (diskantfilter) bedre. Som standard er filerne sat til 250Hz (basfilter) og 4000Hz (diskantfilter) som dækker det normale tale område.

Eksempler:

- Hvislelyde eller fløjt er typisk høje tone altså i diskanten, og filterne kan med fordel sættes til 2000Hz i basfilteret og 6000Hz i diskantfilteret.
- Har klienten primært brummelyde, er det typisk i bas område og filerne kan sættes til 250Hz i basfilteret og 1000Hz i diskantfilteret.
- Kan klienten bruge tale området både mand og kvinde vælges standardindstillingen 250Hz i basfilteret og 4000Hz i diskanten filteret.

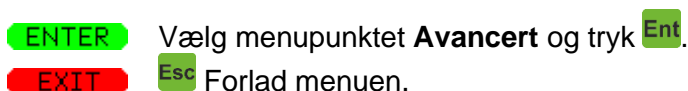

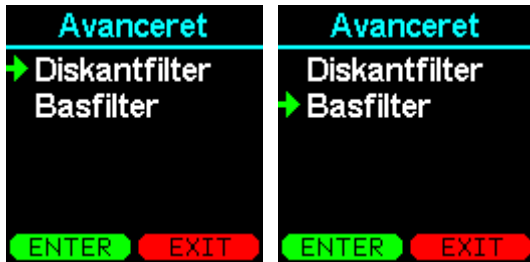

ENTER Vælg menupunktet **Basfilter** eller **Diskantfilter** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



ENTER Vælg den ønsket frekvens og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Spærretid

Efter aktivering af mikrofon og afsendelse af alarm kan en spærretid vælges. I spærretiden kan produktet ikke sende en lydaktiveret alarm, før tiden er udløbet. Det er muligt at slukke for spærretiden.

Funktionen reducerer antallet af gentagne alarmer i samme aktivering. Produktet er sat til 90 sekunder som standard.



ENTER Vælg menupunktet Spærretid og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



- ENTER** Vælg den ønskede tid og tryk **Ent**.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.

Nulstil mikrofonens indstillingerne



- ENTER** Vælg menupunktet **Nulstil** og tryk **Ent**.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.




- YES** **Ent** Nulstille mikrofonindstillingerne til fabriksindstilling.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.




Hovedmenu - Indstillinger - Tidsstyring




Produktet har fire timere, som kan tænde og slukke for mikrofonen i løbet af dagen og ugen.

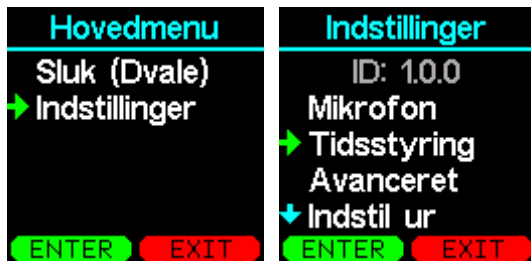VIGTIGT: Er uret ikke sat, bliver tidsstyring automatisk frakoblet, og dermed er mikrofon altid aktiv.

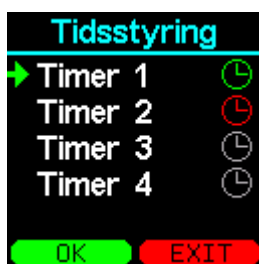

ENTER Vælg menupunktet **Tidsstyring** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



 Timeren er programmeret men er **ikke** indenfor den programmerede tid.
 Timeren er programmeret og er indenfor den programmerede tid.
 Intet symbol, timeren er ikke programmeret.
 Timeren er **ikke** programmeret.

ENTER Vælg den ønskede timer og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



Aktiveret: Ja Timeren tændt.
Aktiveret: Nej Timeren slukket.

Start: 8:00 Start tidspunkt.
Stop: 16:00 Stop tidspunkt.

MTOTFLS Timeren tændt på disse ugedage. Grøn markere tændt på dagen.

Gem? Gem timer indstillingen.



Aktivering



- FLIP** Skift imellem ja og nej.
- EXIT** Forlad menuen.

Start/stop tidspunkt



- Ændre timer/minutter.
- NEXT** for at skifte til næste indstilling.
- BACK** Gå tilbage.

Aktiveret på dag(e)



- Ændre dage.
- FLIP** Skift imellem at fravælge (rød) og tilvælge (grøn) dagen.
- BACK** Forlad menuen.

Gem!



- SAVE** Gem indstillingerne.
- EXIT** Forlad menuen.



Hovedmenu - Indstillinger - Avanceret



- ENTER** Vælg menupunktet **Avanceret** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Lyd & lyd



- ENTER** Vælg menupunktet **Lys & lyd** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



- ENTER** Vælg den ønsket menu og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Baggrundsls:

Displayets lysstyrke.

Lysfunktion:

Slukket, display tænder ved betjening.

Aktivitet, display tænder ved lyd og alarm (nedtonet).

Auto/nedtonet, displayet er normalt slukket i batteridrift ellers nedtonet.

Tastelyd:

Lydstyrken på et tastetryk.



Baggrundsllys	Lys funktion	Tastelyd
Lavt niveau → Mellem niveau Højt niveau	Slukket → Aktivitet Auto/nedtonet	Slukket → Lavt niveau Højt niveau
SAVE EXIT	SAVE EXIT	SAVE EXIT

SAVE Ent Gem indstillingerne.
EXIT Esc Forlad menuen.

Sprog

Hovedmenu	Indstillinger	Avanceret
Sluk (Dvale) → Indstillinger	↑ Mikrofon Tidsstyring → Avanceret Indstil ur ↓ Trådløs	Lys & lyd → Sprog Sommertid Produkt navn Adgangskode
ENTER EXIT	ENTER EXIT	ENTER EXIT

ENTER Vælg menupunktet **Sprog** og tryk Ent.
EXIT Esc Forlad menuen.

Sprog	Sprog
→ Dansk Svenska Norsk Suomi ↓ English	↑ Norsk Suomi English Deutsch → Español
OK EXIT	OK EXIT

Indstil det ønskede sprog i produktet.

↑ ↓ Ændre sprog.
ENTER Ent Acceptere nyt sprog.
EXIT Esc Forlad menuen.



Sommertid


Det er muligt at tænde eller slukke for automatisk sommer/vintertid. Normalt er den sat til automatisk.



ENTER Vælg menupunktet **Sommertid** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Manuelt: Tiden forbliver uændret ved sommer/vintertid skifte.

Automatisk: Tiden ændres automatisk to gange om året.

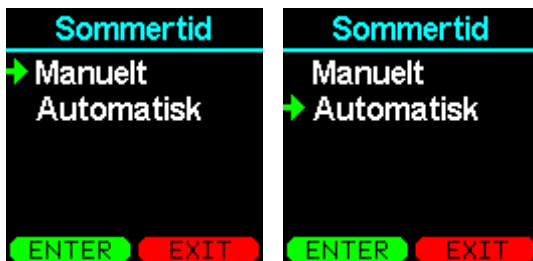

ENTER **Ent** Gem indstillingerne.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Produkt navn

Navnet på LAK901 kan ændres til et mere sigende navn f.eks. "Birthe", som i dette eksempel er klienten af dette produkt. Det er en valgfri funktion. Som standard vises LAK901.



ENTER Vælg menupunktet **Produkt navn** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



Ændre bogstav.

Ent Vælg bogstav.

Esc Slet sidste bogstav.

Ent i ca 1 sekund for skifte imellem små og store bogstaver.

Ent i ca 3 sekunder for hoppe til gemmeikonet.

Esc i ca 3 sekunder for at forlade menuen.

for skifte imellem normale og specielle bogstaver.



For at gemme navnet vælges symbolet og tryk .

Esc Forlad menuen.

Adgangskode

For at undgå utilsigtede ændringer i indstillingerne, kan menuen beskyttes med en adgangskode. Adgangskoden er en fire cifferet kode.

Koden "0000" betyder ingen kode!

Når der er oprettet en adgangskode, skal denne indtastes, før der gives adgang til indstillingsmenuen.



For at slettet en adgangskode indtastes "0000"!





- ENTER** Vælg menupunktet **Adgangskode** og tryk **Ent**.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.



-   Ændre værdien (0 til 9).
- ENTER** **Ent** Vælg tallet.
- BACK** **Esc** Slet sidste ciffer.
- BACK** **Esc** Hold tasten nede i 2 sekunder for at forlade menuen.



- SAVE** **Ent** Gem koden.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.

Bemærk: Der kan først gemmes, når alle fire cifre er valgt.



Hovedmenu - Indstillinger - Indstil ur

Det er vigtigt at klokkeslet og dato er indstillet korrekt, således tidsstyringer fungerer korrekt. Såfremt uret ikke sat, er det ikke muligt at have tidsstyringen aktiveret.



ENTER Vælg menupunktet **Indstil ur** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Indstil ur



Ændre indstillingen.
NEXT **Ent** Gå til næste.
BACK **Esc** Gå tilbage eller forlade menuen.

Gem ny ur indstilling



SAVE **Ent** Gem indstillingerne.
BACK **Esc** Forlad menuen.

Bemærk: Hvis produktet anvender et KNOP system (MR902/RP902/USB901) opdateres uret automatisk. Alternativt vil produktet forsøge at holde uret opdateret med andre produktet som har en nyere indstilling.



Hovedmenu - Indstillinger - Trådløs



- ENTER** Vælg menupunktet **Trådløs** og tryk **Ent**.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.

KNOP-logo



- ENTER** Vælg menupunktet **KNOP logo** og tryk **Ent**.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.

KNOP-logoet anvendes som opkald til andre, hvis denne er indprogrammeret på deres modtagere. Knappen kan enten sende et normalt alarmopkald, nød alarmopkald eller frakoblet.

Frakoblet: Sender KNOP-knappen intet.

Alle: Sender et nødopkald til alle modtagere som har mulighed for at modtager opkaldet.

Normal: Sender et opkald til modtager, hvor dette produktet og knappen er indkodet.



- ENTER** **Ent** Gem indstillingerne.
- EXIT** **Esc** Forlad menuen.



Radio

Det er muligt at tænde eller slukke den trådløse sender i produktet. Det er tilrådeligt at slukke senderen hvis kun relæudgangen på produktet anvendes således produktet ikke sender unødvendigt - og batterilevetiden forlænges.




ENTER Vælg menupunktet **Radio** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Frakoblet: Der sendes ingen beskeder.

Tilkoblet: Lydaktiverede beskeder sendes.

Såfremt KNOP-logoet er indstillet til at sender en alarm fungerer det i begge tilfælde.

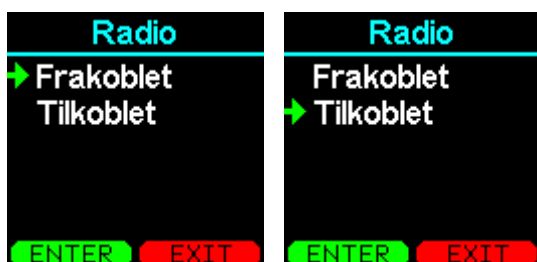

ENTER **Ent** Gem indstillingerne.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



Hovedmenu - Indstillinger - Sluk

Slukker for produktet helt og kan kun efterfølgende tændes ved at trykke på **Ent**.



ENTER Vælg menupunktet **Sprog** og tryk **Ent**.
EXIT **Esc** Forlad menuen.



YES **Ent** Acceptere nyt sprog.
EXIT **Esc** Forlad menuen.

Ønskes produktet blot i dvale, kan dette gøres i menupunktet " Indstillinger ➔ Sluk".

Bemærk: Ur og dato bliver nulstillet.



Vedligehold

Opdatering af LAK901

Det er muligt at opdatere softwaren i LAK901, samt downloade og uploade opsætning med KNOPTool. For nærmere beskrivelse henvises til KNOPTool på www.knop.dk

Nulstilling af produktet

Sluk produktet helt, husk at fjerne adapter eller ekstern forsyning inden.

Straks derefter, hold **Ent Esc** nede samtidigt i ca. 1 sekund, slip **Ent** og hold forsat **Esc** nede imens lysdioden blink rødt.

Hold knappen nede, indtil lysdioden lyser grønt.

Slip derefter **Esc** knappen.

Produktet kan/skal derefter tændes igen ved at trykke på **Ent**.

Genstart produkt


Hold **Esc** nede i ca. 30 sekund indtil produktet genstarter. Slip derefter **Esc** knappen.

Produktet kan derefter tændes igen ved at tryk på **Ent**.

Batterifejl og udskiftning

Produktet viser ”**BATTERI FEJL**” når batteriet skal udskiftes.

Batteriet må kun udskiftes med et originalt batteri levereret af KNOP Elektronik.
Se medfølgende vejledning på det nye batteri.

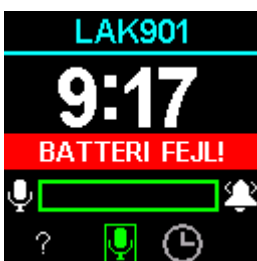



Rengøring

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

Kontrol af dækningsområde

En person aktiverer produktet med korte mellemrum, mens en anden går systematisk rundt i området og på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning afmærker. Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer.

Dækningsområdet kan øges ved brug af KNOPs repeatersystem.

Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.

Reserve dele og tilbehør

Reserve dele og tilbehør kan bestilles på vores hjemmeside www.knop.dk



Tekniske data

Frekvens HF:	869.2125 MHz
Rækkevidde:	Optil 1500 m mellem LAK901 og RX901B ⁽¹⁾
Batteri:	Litium batteri, LP853048 3,7V 1200mA
Driftstid på batteri:	Ca. 14 døgn med 10 alarmopkald pr. døgn alt efter indstillinger.
Strømforsyningsenhed:	230VAC adapter USB 5VDC/1,0A
Opladning:	ca. 90 minutter
Display:	Grafisk LCD.
Menu tekster:	7 sprog: Dansk, norsk, svensk, finsk, tysk, engelsk og spansk.
Omgivelsesmiljø:	Indendørs brug. ≤ 90% ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur:	0°C to +40°C
Kabinettype:	Farve RAL9001 ABS
Kabinetdimensionér:	B: 65mm, H: 120mm, D: 20mm.
Tæthed:	IP20
Vægt:	100g

Ret til ændringer forbeholdes.















All rights reserved.

© **KNOP** Elektronik A/S

⁽¹⁾ Målt udendørs med fri sigt mellem sender og modtager. I bygninger, er rækkevidden reduceret.



Symbolforklaring og godkendelser

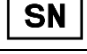	<p>Dette produkt overholder disse standarder og direktiver:</p> <table border="0"> <tr> <td>Directive 2017/745/EU</td> <td>MDR</td> </tr> <tr> <td>Directive 1907/2006/EU</td> <td>REACH</td> </tr> <tr> <td>Directive 2011/65/EU</td> <td>RoHS</td> </tr> <tr> <td>ISO 14971:2019</td> <td>Risk Management for Medical devices</td> </tr> <tr> <td>EN 301 498-1 V2.2.3</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 301 489-3 V3.1.1</td> <td>Electro Magnetic Compatibility</td> </tr> <tr> <td>EN 50130-4:2011 + 2014</td> <td>Immunity alarm systems</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-1 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-2 V3.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 300 220-3 V2.1.1</td> <td>Short Range Devices</td> </tr> <tr> <td>EN 60601-1-2:2014 + 2015</td> <td>Electromagnetic compatibility (Medical)</td> </tr> <tr> <td>EN 62368-1:2020</td> <td>Electrical safety</td> </tr> <tr> <td>EN 50581:2012</td> <td>Hazardous substances</td> </tr> </table>	Directive 2017/745/EU	MDR	Directive 1907/2006/EU	REACH	Directive 2011/65/EU	RoHS	ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices	EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility	EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility	EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems	EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices	EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices	EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)	EN 62368-1:2020	Electrical safety	EN 50581:2012	Hazardous substances
Directive 2017/745/EU	MDR																										
Directive 1907/2006/EU	REACH																										
Directive 2011/65/EU	RoHS																										
ISO 14971:2019	Risk Management for Medical devices																										
EN 301 498-1 V2.2.3	Electro Magnetic Compatibility																										
EN 301 489-3 V3.1.1	Electro Magnetic Compatibility																										
EN 50130-4:2011 + 2014	Immunity alarm systems																										
EN 300 220-1 V3.1.1	Short Range Devices																										
EN 300 220-2 V3.1.1	Short Range Devices																										
EN 300 220-3 V2.1.1	Short Range Devices																										
EN 60601-1-2:2014 + 2015	Electromagnetic compatibility (Medical)																										
EN 62368-1:2020	Electrical safety																										
EN 50581:2012	Hazardous substances																										
	<p>Produktet må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget.</p>																										
	<p>Medical Device Klasse 1</p>																										
	<p>Manufacturer KNOP Elektronik A/S, Fabriksvej 20, DK-7600 Struer</p>																										
	<p>Læs manual(er) før installation og ibrugtagning.</p>																										
	<p>Der kan ske interferens i omgivelserne af udstyr mærket med dette symbol.</p>																										
	<p>Skal beskyttes imod væske.</p>																										
	<p>0°C to +40°C, temperaturgrænse for transport/opbevaring og anvendelse.</p>																										
	<p>Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.</p>																										
	<p>Single Registration Number DK-MF-000025631</p>																										
	<p>Unique Device Identifier LAK901: 05744002850465 MI901: 05744002853466</p>																										
	<p>Product reference LAK901: Sound alarm MI901: External microphone</p>																										
	<p>Serial Number Serienummeret er placeret på produktet</p>																										
	<p>Ingress Protection kode IP20</p>																										