

Brugervejledning for LS901



Indholdsfortegnelse

Tilslutning2

Tilslutning2

Lysdioden.....2

Programmering.....2

Sletning3

Genstart3

Sluk3

Vedligehold.....4

Tekniske data LS901:5

Tilsluttet anvendelse

LS901 er en lyskilde der kan hjælpe med at minimere faldskader. Den kan f.eks. tænde for lyset, når en person forlader sengen eller når vedkommende trykker på armbåndssenderen.

LS901 har indbygget batteribackup, så den også virker ved en strømafbrydelse.

Produktet er designet til at fungere sammen med andre produkter i KNOP's 901-serie.

Det er muligt at indprogrammere op til fem forskellige sender som kan aktivere lyset samt hvor lang tid lyset skal være tændt.

Tilslutning

LS901 skal blot tilsluttes en stikkontakt. Der er ingen yderligere tilslutningsmuligheder.





Den tænder automatisk, når der tilsluttes strøm.

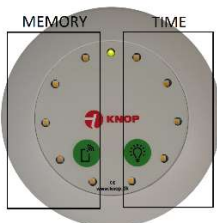
Lysdioden

Lysdioden viser status på produktet.

Grøn:	Alt er OK.
Grøn blink:	Indkodning aktiv.
Rød:	Batteri drift.



Programmering

For at programmere enheden, trykkes der samtidigt på   indtil lysdioden blinker grønt.



I venstre side der med svagt lys hvor der allerede er indkodet sender. Den valgt hukommelse plads vises med blink. Vælges en allerede indkodet plads overskrives denne.

I højre side vises hvor lang tid lyset er tændt for aktuelle hukommelsesplads. Der skal vælges imellem 30sekunder (nederst), 2, 5, 10 og 30 minutter (øverst).





- Vælg først hvilken hukommelse der ønskes benyttet ved trykke på .
- Derefter aktivere senderen skal indkodes.
- Vælg derefter med  knappen hvor lang tid lyset skal være tændt.

Hvis der ønskes flere indkodninger kan dette foretages herefter ved at gentages proceduren.

Programmering forlades automatisk, hvis der ikke trykkes yderligere på knapperne efter et minut. Alternativt, kan begge knapper holdes inden i 3 sekunder.

Sletning

For at slettet alle indkodningerne:


- Tryk samtidigt på   indtil lysdioden blinker grønt, for komme ind i programmering.
- Tryk igen på   indtil lysdioden blinker rødt efter ca. 6 sekunder.

Genstart

Det er muligt at genstart produktet ved at holde  inde indtil lysdioden går ud – ca. 20-30 sekunder.

Er produktet taget ud af stikkontakten, slukker produktet følgende.

Sluk

For at slukke produktet, tages produktet ud af stikkontakten. Derefter holdes  nede indtil lysdioden blinker rødt. Produktet kan tændes igen ved at sættet det i stikkontakten.

Vedligehold

Opdatering af LS901

Det er muligt at opdatere softwaren i LS901. For nærmere beskrivelse henvises til KNOPTool.

Rengøring

Produktet kan rengøres med en fugtig klud eller spritserviet.

Bortskaffelse

Produktet må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald, men behandles efter kommunens anvisning for elektronikaffald.



Kontrol af dækningsområde

En person aktiverer produktet med korte mellemrum, mens en anden går systematisk rundt i området og afmærker på en skitse over bygningen og området, hvor der er dækning. Skitsen lægges på kontoret, så alle, der skal betjene systemet, kan se, hvor der er dækning. Udenfor dækningsområdet kan der ikke modtages alarmer. Kontakt din forhandler for nærmere oplysning.

Tekniske data LS901:

Frekvens:	869.2125 MHz
Rækkevidde:	Optil 1500 m mellem LS901 og TX901 i fri luft *)
Spænding:	230 VAC
Forbrug:	<1W (st.by) max 5W
Stik:	2-pol EURO
Batteri backup:	Ca. 15 timer uden lys, ca. 3 timer med lys.
Opladetid:	Ca. 1 dag
Omgivelse miljø:	Indendørs brug. <90 % fugtighed ikke kondenserende.
Omgivelse temperatur:	0-40° C
Kabinet type:	Hvid ABS
Kabinet dimensioner:	Ø110 x 52mm
Tæthed:	IP40
Vægt inkl. Batterier:	135g

Ret til ændringer forbeholdes.

*) Målt udendørs med fri sigt mellem sender og modtager.
I bygninger, er rækkevidden reduceret.
Kontrollere dækningsområdet som beskrevet i afsnittet herom.

Ret til ændringer forbeholdes.